



PROTHESEUS



Katalog

Prothetik

VERSION: 25.03.2026

Protheseus GmbH

Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 | Fax: 09122 8870729

E-Mail: info@protheseus.de | www.protheseus.de

Inhaltsverzeichnis

1. Liner und Kniekappen	- 6 -
2. Ventile	- 31 -
3. Locks und Verschiebeadapter	- 36 -
4. Click Drehverschlüsse	- 40 -
5. Modularteile	- 43 -
6. Heavy Duty Produkte	- 56 -
7. Prothesenfüße	- 58 -
8. Kniegelenke	- 74 -
9. Kinderpassteile	- 80 -
10. Anziehhilfe und Stumpfstrümpfe	- 81 -
11. Keasy und Kosmetiken	- 89 -
12. Amparo	- 100 -
13. Elevate 360°	- 103 -
14. Comfit AFO	- 104 -
15. Hylton Kompressionsorthesen	- 105 -
16. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse	- 109 -

Gel Liner Übersicht

Abbildung	Name	Artikelnummer	Distales Ende
	VitaGel	PY26... PY16...	Mit Pin Ohne Pin
	Pro-Fit	PY346... PY356...	Mit Pin Ohne Pin
	UltraSeal Gel mit niedrigem Ring	PYUSUGL... PYUSUGC...	Mit Pin Ohne Pin
	UltraSeal Gel mit mittlerem Ring	PYUSLGL... PYUSLGC...	Mit Pin Ohne Pin
	UltraSeal Gel mit hohem Ring	PYUSHGL... PYUSHGC...	Mit Pin Ohne Pin
	Easy	PY3063... PY3163...	Mit Pin Ohne Pin
	Extreme	PY3AKDT... PY3AKFR...	Mit Pin Ohne Pin
	Anterior Posterior Tapered	PY3APDTP... PY3APFRTP...	Mit Pin Ohne Pin
	Superior Performance	PY3SPFR... PY3SPDT...	Mit Pin Ohne Pin

Material	Profil	Mobilitätsgrad	Eigenschaft
Gel	6 mm uniform 6/3 mm	1 – 3	Hautpflegendes Mineralöl
OptiGel	3 mm uniform 6mm uniform	2 – 4	Weißes, hautfreundliches Gel
OptiGel	3 mm uniform	1 – 4	Weißes, hautfreundliches Gel
OptiGel	3 mm uniform	1 – 4	Weißes, hautfreundliches Gel
OptiGel	3 mm uniform	1 – 4	Weißes, hautfreundliches Gel
EasyGel	3 mm uniform 6 mm uniform 6/3 mm	1 – 4	Mit Antioxidanzien
GripGel	3 mm uniform 6 mm uniform	1 – 3	Exzellente Haftung für gesundes Hautgewebe
High Density Gel	6/3 mm	2 – 4	Speziell für den Wechsel von Silikon- auf Gel-Linern
Grip Gel	3 mm uniform 6 mm uniform	1 – 3	Exzellente Haftung für gesundes Hautgewebe

Silikon Liner Übersicht

Abbildung	Name	Artikelnummer	Distales Ende
	Dekulife Comfort	PY40... PY42...	Mit Pin Ohne Pin
	SoftSil	PY012... PY022...	Mit Pin Ohne Pin
	ADAPT Unterschenkel	PP1S350e... PP1S340e...	Mit Pin Ohne Pin
	ADAPT Oberschenkel	PP1S360e...	Mit Pin
	Parasil Unterschenkel	PP1S310... PP1S300...	Mit Pin Ohne Pin
	Parasil Oberschenkel	PP1S330... PP1S320...	Mit Pin Ohne Pin
	UltraSeal Silikon mit hohem Ring	PYUSHSL... PYUSHSC...	Mit Pin Ohne Pin
	UltraSeal Silikon mit mittlerem Ring	PYUSLSL... PYUSLSC...	Mit Pin Ohne Pin
	UltraSeal Silikon mit niedrigem Ring	PYUSUSL... PYUSUSC...	Mit Pin Ohne Pin

Material	Profil	Mobilitätsgrad	Eigenschaft
Silikon	3 mm	1 – 4	Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon
OptiSil	3 mm uniform	2 – 4	Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon
Silikon / Gel	3 mm uniform, 6 mm uniform, 6/3 mm	2 – 4	Mit Antioxydanzen
Silikon / Gel	3 mm uniform, 6 mm uniform, 6/3 mm	2 – 4	Mit Antioxydanzen
Silikon	3 mm uniform	2 – 4	Platinvernetztes, medizinisches Mineralöl-Silikon mit einer Parylene [®] -Beschichtung
Silikon	3 mm uniform	2 – 4	Platinvernetztes, medizinisches Mineralöl-Silikon mit einer Parylene [®] -Beschichtung
OptiSil	3 mm uniform	1 – 4	Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon
OptiSil	3 mm uniform	1 – 4	Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon
OptiSil	3 mm uniform	1 – 4	Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon

1. Liner und Kniekappen

Pro-Fit Liner mit OptiGel



Der **Pro-Fit Liner** wurde entwickelt, um Amputierten ein unvergleichliches Ausmaß an Komfort und Kontrolle zu bieten. Mit der herausragenden Anpassungsfähigkeit an die Form des Stumpfs, die durch die OptiGel-Technologie gewährleistet wird, bietet der Pro-Fit einen sicheren und passgenauen Sitz am Stumpf, der die Kontrolle, Komfort und Sicherheit für den Benutzer erhöht und damit das Vertrauen in die alltäglichen Aktivitäten stärkt.

Pro-Fit wird mit OptiGel hergestellt, einem speziellen weißen Gel von ALPS®, das die Anpassungsfähigkeit der Prothese an die Form des Stumpfs verbessert und einen optimalen Sitz garantiert. Das hochwertige graue Gewebe zeichnet sich durch seine geringe Längsdehnung aus, die den Längshub wirksam minimiert. Bei der Version mit distalem Anschluss garantieren das optimierte distale Ende und eine innovative U-förmige Matrix für zusätzliche Stabilität.

Pro-Fit Liner 6 mm mit Pin

Artikelnummer	Größe / Wandstärke	Umfang (6 cm über Stumpfe)
PY34620P	20 / 6 mm	20 – 23 cm
PY34624P	24 / 6 mm	24 – 25 cm
PY34626P	26 / 6 mm	26 – 27 cm
PY34628P	28 / 6 mm	28 – 31 cm
PY34632P	32 / 6 mm	32 – 37 cm
PY34638P	38 / 6 mm	38 – 43 cm
PY34644P	44 / 6 mm	44 – 53 cm

Pro-Fit Liner 6 mm ohne Pin

Artikelnummer	Größe / Wandstärke	Umfang (6 cm über Stumpfe)
PY35620C	20 / 6 mm	20 – 23 cm
PY35624C	24 / 6 mm	24 – 25 cm
PY35626C	26 / 6 mm	26 – 27 cm
PY35628C	28 / 6 mm	28 – 31 cm
PY35632C	32 / 6 mm	32 – 37 cm
PY35638C	38 / 6 mm	38 – 43 cm
PY35644C	44 / 6 mm	44 – 53 cm



Pro-Fit Liner mit OptiGel



Pro-Fit Liner 3 mm mit Pin

Artikelnummer	Größe / Wandstärke	Umfang (6 cm über Stumpfende)
PY34320P	20 / 3 mm	20 – 23 cm
PY34324P	24 / 3 mm	24 – 25 cm
PY34326P	26 / 3 mm	26 – 27 cm
PY34328P	28 / 3 mm	28 – 31 cm
PY34332P	32 / 3 mm	32 – 37 cm
PY34338P	38 / 3 mm	38 – 43 cm
PY34344P	44 / 3 mm	44 – 53 cm

Pro-Fit Liner 3 mm ohne Pin

Artikelnummer	Größe / Wandstärke	Umfang (6 cm über Stumpfende)
PY35320C	20 / 3 mm	20 – 23 cm
PY35324C	24 / 3 mm	24 – 25 cm
PY35326C	26 / 3 mm	26 – 27 cm
PY35328C	28 / 3 mm	28 – 31 cm
PY35332C	32 / 3 mm	32 – 37 cm
PY35338C	38 / 3 mm	38 – 43 cm
PY35344C	44 / 3 mm	44 – 53 cm

Pro-VitaGel Liner

Die Liner mit Pinanschluss gibt es in unterschiedlichen Wandstärken:

- a. Wandstärke 6mm Anterior und 3mm Posterior, so dass Sie eine gute Polsterung haben und zusätzlich das Knie ohne Wulst in der Kniekehle beugen können. Farbe: Grau

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY26320S	Small	18 – 20 cm
PY26320M	Medium	20 – 24 cm
PY26324M1	Medium+	24 – 28 cm
PY26328L	Large	28 – 34 cm
PY26334L1	Large+	34 – 40 cm



- b. Wandstärke 6mm Uniform, wenn die Beugehilfe nicht erforderlich ist und Sie eine zirkuläre gute Polsterung wünschen. Farbe: Grau

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY26624M1	Medium+	24 – 28 cm
PY26628L	Large	28 – 34 cm
PY26634L1	Large+	34 – 40 cm

Die Liner ohne Pinanschluss gibt es in unterschiedlichen Wandstärken:

- a. Wandstärke 6mm Anterior und 3mm Posterior, so dass Sie eine gute Polsterung haben und zusätzlich das Knie ohne Wulst in der Kniekehle beugen können. Farbe: Grau

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY16318	Small	18 – 20 cm
PY16320	Medium	20 – 24 cm
PY16324	Medium+	24 – 28 cm
PY16328	Large	28 – 34 cm
PY16334	Large+	34 – 40 cm



- b. Wandstärke 6mm Uniform, wenn die Beugehilfe nicht erforderlich ist und Sie eine zirkuläre gute Polsterung wünschen. Farbe: Grau

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY16024M1	Medium+	24 – 28 cm
PY16028L	Large	28 – 34 cm
PY16034L1	Large+	34 – 40 cm

Hinweis: Liner in anderen Ausführungen gibt es als Sonderbestellung auf Anfrage.



Superior Performance Liner



Superior Performance Liner, 3mm, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY3SPDT203	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm
PY3SPDT243	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm
PY3SPDT263	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm
PY3SPDT283	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm
PY3SPDT323	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 32, Umfang 32-34cm
PY3SPDT353	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 35, Umfang 35-37cm
PY3SPDT383	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 38, Umfang 38-43cm
PY3SPDT443	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 44, Umfang 44-53cm

Superior Performance Liner, 3mm, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY3SPFR203	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm
PY3SPFR243	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm
PY3SPFR263	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm
PY3SPFR283	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm
PY3SPFR323	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 32, Umfang 32-34cm
PY3SPFR353	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 35, Umfang 35-37cm
PY3SPFR383	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 38, Umfang 38-43cm
PY3SPFR443	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 44, Umfang 44-53cm

Anterior Posterior Tapered Liner



Anterior Posterior Tapered Liner, 6/3mm, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY3APFRTP20	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm
PY3APFRTP24	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm
PY3APFRTP26	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm
PY3APFRTP28	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm
PY3APFRTP32	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 32, Umfang 32-37cm

Anterior Posterior Tapered Liner, 6/3mm, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY3APDTTP20	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm
PY3APDTTP24	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm
PY3APDTTP26	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm
PY3APDTTP28	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm
PY3APDTTP32	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 32, Umfang 32-37cm



Easy-Liner



Easy-Liner, 6/3mm, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY316316C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 16-19 cm Umfang
PY316320C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 20-23 cm Umfang
PY316324C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 24-25 cm Umfang
PY316326C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 26-27 cm Umfang
PY316328C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 28-31 cm Umfang
PY316332C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 32-37 cm Umfang
PY316338C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 38-43 cm Umfang
PY316344C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 44-52 cm Umfang

Easy-Liner, 6/3mm, 10cm Matrix, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY306316P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 16-19 cm Umfang
PY306320P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 20-23 cm Umfang
PY306324P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 24-25 cm Umfang
PY306326P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 26-27 cm Umfang
PY306328P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 28-31 cm Umfang
PY306332P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 32-37 cm Umfang
PY306338P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 38-43 cm Umfang
PY306344P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 44-52 cm Umfang

Extreme Liner



Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY3AKFR16-3	Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 16-19 cm Umfang
PY3AKFR20-3	Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PY3AKFR24-3	Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PY3AKFR26-3	Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PY3AKFR28-3	Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PY3AKFR32-3	Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-37 cm Umfang
PY3AKFR38-3	Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PY3AKFR44-3	Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-53 cm Umfang

Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY3AKDT16-3	Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 16-19 cm Umfang
PY3AKDT20-3	Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PY3AKDT24-3	Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PY3AKDT26-3	Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PY3AKDT28-3	Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PY3AKDT32-3	Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 32-37 cm Umfang
PY3AKDT38-3	Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PY3AKDT44-3	Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 44-53 cm Umfang



Extreme Liner




Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYAKFR16-6	Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 16-19 cm Umfang
PYAKFR20-6	Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PYAKFR24-6	Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PYAKFR26-6	Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PYAKFR28-6	Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PYAKFR32-6	Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-37 cm Umfang
PYAKFR38-6	Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PYAKFR44-6	Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-53 cm Umfang

Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY3AKDT16-6	Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 16-19 cm Umfang
PY3AKDT20-6	Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PY3AKDT24-6	Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PY3AKDT26-6	Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PY3AKDT28-6	Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PY3AKDT32-6	Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 32-37 cm Umfang
PY3AKDT38-6	Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PY3AKDT44-6	Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 44-53 cm Umfang

UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring

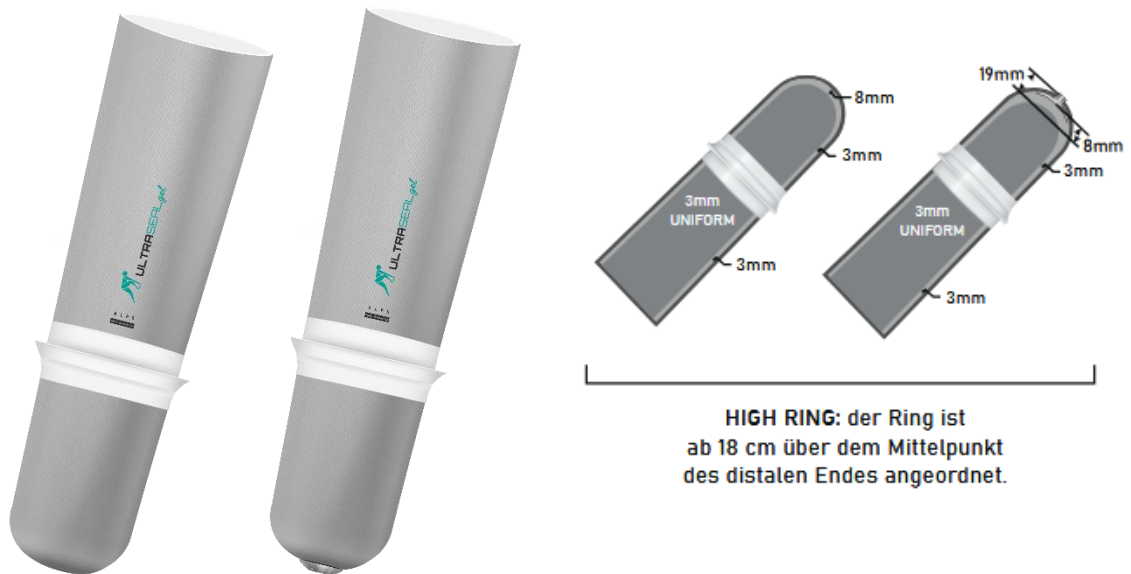


UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSHGC203	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PYUSHGC243	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PYUSHGC263	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PYUSHGC283	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PYUSHGC323	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-34 cm Umfang
PYUSHGC353	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 35-37 cm Umfang
PYUSHGC383	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PYUSHGC443	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-47 cm Umfang

UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSHGL203	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PYUSHGL243	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PYUSHGL263	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PYUSHGL283	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PYUSHGL323	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 32-34 cm Umfang
PYUSHGL353	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 35-37 cm Umfang
PYUSHGL383	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PYUSHGL443	UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 44-47 cm Umfang

UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring

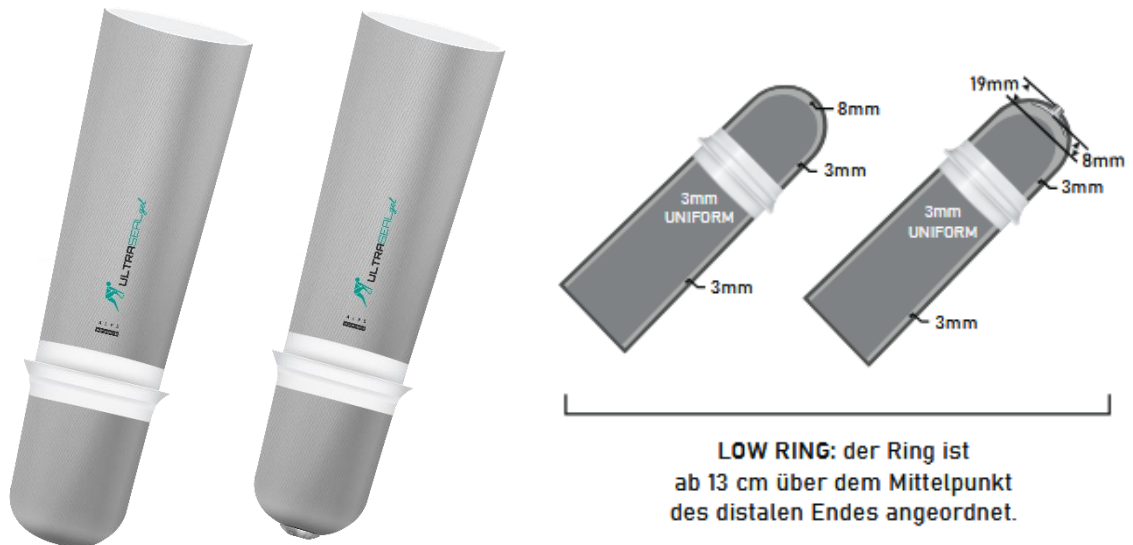


UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSLGC203	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PYUSLGC243	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PYUSLGC263	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PYUSLGC283	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PYUSLGC323	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-34 cm Umfang
PYUSLGC353	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 35-37 cm Umfang
PYUSLGC383	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PYUSLGC443	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-47 cm Umfang

UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSLGL203	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PYUSLGL243	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PYUSLGL263	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PYUSLGL283	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PYUSLGL323	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 32-34 cm Umfang
PYUSLGL353	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 35-37 cm Umfang
PYUSLGL383	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PYUSLGL443	UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 44-47 cm Umfang

UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring

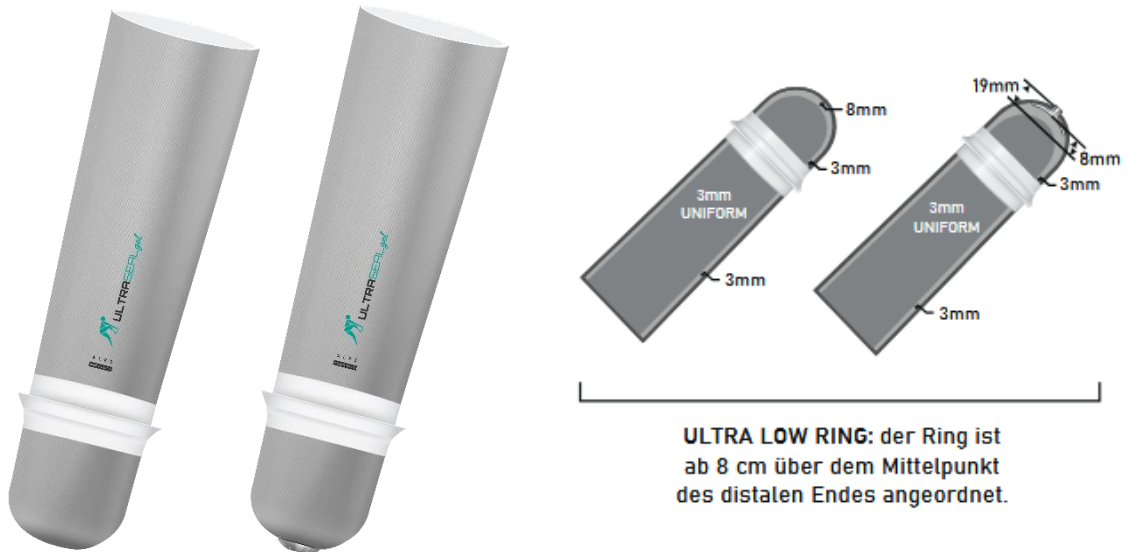

UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSUGC203	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PYUSUGC243	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PYUSUGC263	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PYUSUGC283	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PYUSUGC323	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-34 cm Umfang
PYUSUGC353	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 35-37 cm Umfang
PYUSUGC383	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PYUSUGC443	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-47 cm Umfang

UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSUGL203	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang
PYUSUGL243	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang
PYUSUGL263	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang
PYUSUGL283	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang
PYUSUGL323	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 32-34 cm Umfang
PYUSUGL353	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 35-37 cm Umfang
PYUSUGL383	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang
PYUSUGL443	UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 44-47 cm Umfang


Dekulife Comfort Slikon Liner

Die Liner **ohne Pinanschluss** gibt es in der Wandstärken: 3mm

Besondere Merkmale vom Dekulife Comfort Silikonliner mit Außenbezug:

- Weißes, hautfreundliches „medical grade“ Silikon
- Nahtfreies Außengewebe zum einfachen Anziehen
- Nahtfreies Außengewebe zur Verhinderung von Druckstellen
- Hohe Elastizität des Außengewebes
- Geringe Faltenbildung durch das elastische Außengewebe, vor allem in Kniekehlenbereich
- Einfach kürzbar, keine Laufmaschenbildung

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY420160	16	16-18cm
PY420180	18	18-20cm
PY420200	20	20-21cm
PY420235	23,5	23,5-25cm
PY420250	25	25-26,5cm
PY420265	26,5	26,5-28cm
PY420280	28	28-30cm
PY420300	30	30-32cm
PY420320	32	32-34cm
PY420340	34	34-36cm
PY420360	36	36-38cm
PY420380	38	38-40cm
PY420400	40	40-42cm
PY420420	42	42-45cm
PY420450	45	45-48cm

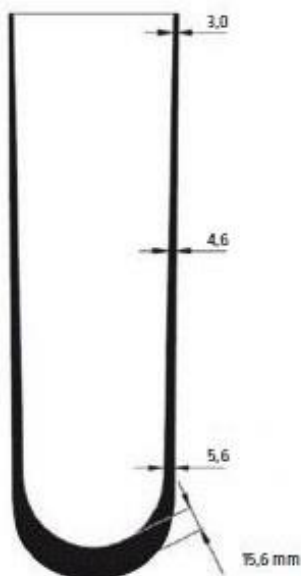

Dekulife Comfort Silikon Liner

Die Liner mit **Pinanschluss** gibt es in der Wandstärke: 3mm

Besondere Merkmale vom Dekulife Comfort Silikonliner mit Außenbezug:

- Weißes, hautfreundliches „medical grade“ Silikon
- Nahtfreies Außengewebe zum einfachen Anziehen
- Nahtfreies Außengewebe zur Verhinderung von Druckstellen
- Hohe Elastizität des Außengewebes
- Geringe Faltenbildung durch das elastische Außengewebe, vor allem in Kniekehlenbereich
- Einfach kürzbar, keine Laufmaschenbildung

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY40160	16	16-18cm
PY40180	18	18-20cm
PY40200	20	20-21cm
PY40235	23,5	23,5-25cm
PY40250	25	25-26,5cm
PY40265	26,5	26,5-28cm
PY40280	28	28-30cm
PY40300	30	30-32cm
PY40320	32	32-34cm
PY40340	34	34-36cm
PY40360	36	36-38cm
PY40380	38	38-40cm
PY40400	40	40-42cm
PY40420	42 <td 42-45cm	
PY40450	45	45-48cm





Parasil Liner Unterschenkel

Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außengewebe,
mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, ohne Pinanschluss




Artikelnummer	Beschreibung
PP1S300-20	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 20
PP1S300-22	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 22
PP1S300-23	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 23,5
PP1S300-25	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 25
PP1S300-26	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 26,5
PP1S300-28	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 28
PP1S300-30	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 30
PP1S300-32	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 32
PP1S300-34	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 34
PP1S300-36	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 36

Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außengewebe,
mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, 10cm Matrix, mit Pinar



Artikelnummer	Beschreibung
PP1S310-18	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 18
PP1S310-20	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 20
PP1S310-22	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 22
PP1S310-23	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 23,5
PP1S310-25	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 25
PP1S310-26	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 26,5
PP1S310-28	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 28
PP1S310-30	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 30
PP1S310-32	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 32
PP1S310-34	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 34
PP1S310-36	Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 36

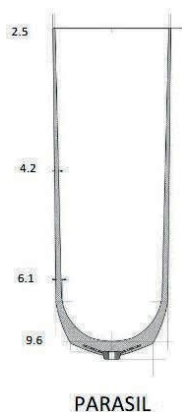

Parasil Liner Oberschenkel

Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außengewebe,
 mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, **ohne Pinanschluss**




Artikelnummer	Beschreibung
PP1S320-30	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 30
PP1S320-32	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 32
PP1S320-34	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 34
PP1S320-36	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 36
PP1S320-38	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 38
PP1S320-40	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 40
PP1S320-45	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 45

Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außengewebe,
 mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, 10cm Matrix, **mit Pinanschluss**



Artikelnummer	Beschreibung
PP1S330-30	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 30
PP1S330-32	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 32
PP1S330-34	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 34
PP1S330-36	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 36
PP1S330-38	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 38
PP1S330-40	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 40
PP1S330-45	Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 45

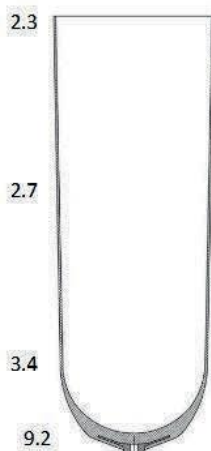

PARASIL

Silikon ADAPT Liner Unterschenkel

Silikon ADAPT Liner Unterschenkel,
mit Außengewebe, **ohne Pinanschluss**




Artikelnummer	Beschreibung
PP1S340e18	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 18
PP1S340e20	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 20
PP1S340e22	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 22
PP1S340e23	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 23,5
PP1S340e25	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 25
PP1S340e26	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 26,5
PP1S340e28	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 28
PP1S340e30	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 30
PP1S340e32	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 32
PP1S340e34	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 34
PP1S340e36	Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 36

Silikon ADAPT Liner Unterschenkel,
mit Außengewebe, 10cm Matrix, **mit Pinanschluss**



Artikelnummer	Beschreibung
PP1S350e18	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 18
PP1S350e20	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 20
PP1S350e22	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 22
PP1S350e23	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 23,5
PP1S350e25	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 25
PP1S350e26	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 26,5
PP1S350e28	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 28
PP1S350e30	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 30
PP1S350e32	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 32
PP1S350e34	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 34
PP1S350e36	Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 36

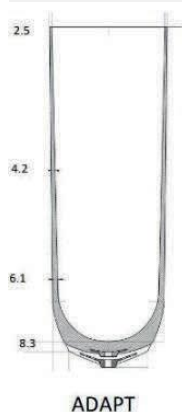


Silikon ADAPT Oberschenkelliner

Silikon ADAPT Oberschenkelliner,
mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss




Artikelnummer	Beschreibung
PP1S360e30	Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 30
PP1S360e32	Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 32
PP1S360e34	Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 34
PP1S360e36	Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 36
PP1S360e38	Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 38
PP1S360e40	Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 40
PP1S360e45	Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 45

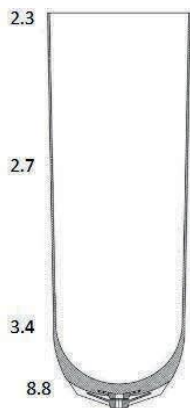

ADAPT

SoftSil Liner

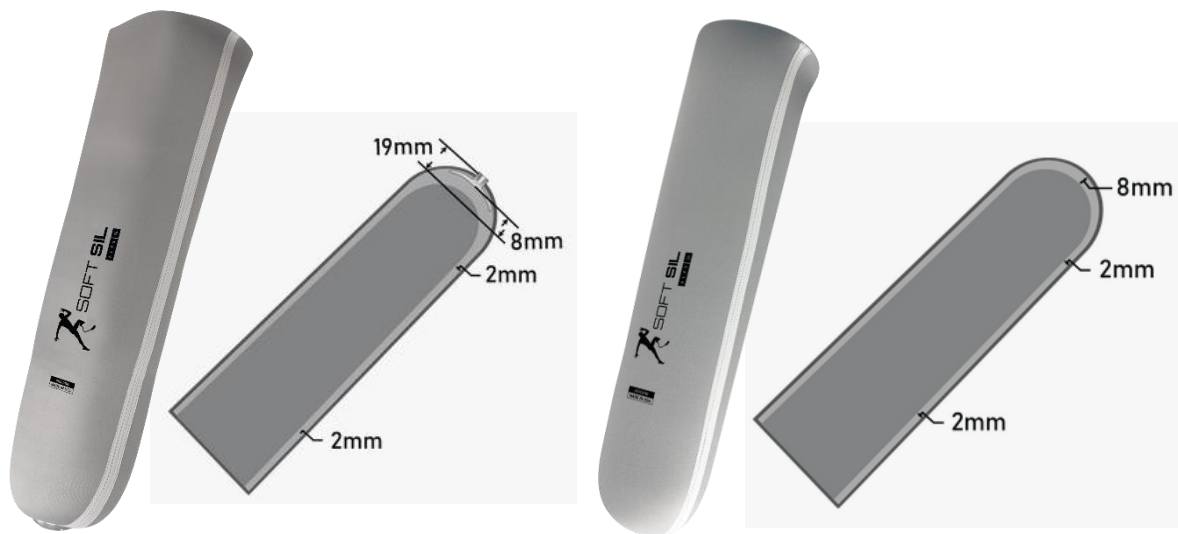

SoftSil Silikonliner, 2mm uniform, ohne Pinanschluss


Artikelnummer	Beschreibung
PY02220	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 20, Umfang 20-22cm
PY02222	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 22, Umfang 22-24cm
PY02224	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 24, Umfang 24-26cm
PY02226	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 26, Umfang 26-28cm
PY02228	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 28, Umfang 28-30cm
PY02230	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 30, Umfang 30-32cm
PY02232	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 32, Umfang 32-35cm
PY02235	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 32, Umfang 35-38cm
PY02238	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 38, Umfang 38-41cm
PY02241	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 41, Umfang 41-44cm
PY02244	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 44, Umfang 44-47cm

SoftSil Silikonliner, 2mm uniform, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PY01220	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 20, Umfang 20-22cm
PY01222	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 22, Umfang 22-24cm
PY01224	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 24, Umfang 24-26cm
PY01226	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 26, Umfang 26-28cm
PY01228	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 28, Umfang 28-30cm
PY01230	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 30, Umfang 30-32cm
PY01232	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 32, Umfang 32-35cm
PY01235	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 35, Umfang 35-38cm
PY01238	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 38, Umfang 38-41cm
PY01241	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 41, Umfang 41-44cm
PY01244	SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 44, Umfang 44-47cm



UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring

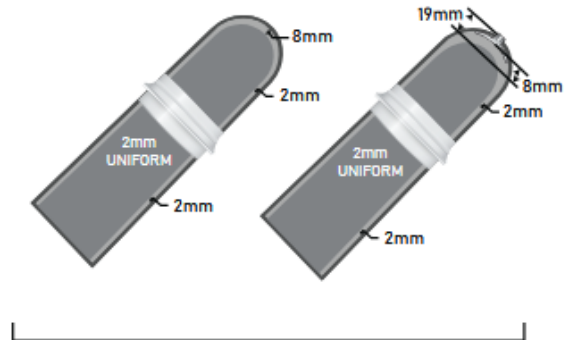

HIGH RING: der Ring ist
ab 18 cm über dem Mittelpunkt
des distalen Endes angeordnet.


UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit hohem Ring, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSHSC20	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm
PYUSHSC22	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm
PYUSHSC24	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm
PYUSHSC26	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm
PYUSHSC28	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm
PYUSHSC30	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm
PYUSHSC32	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm
PYUSHSC35	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm
PYUSHSC38	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm
PYUSHSC41	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm
PYUSHSC44	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm

UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit hohem Ring, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSHSL20	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm
PYUSHSL22	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm
PYUSHSL24	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm
PYUSHSL26	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm
PYUSHSL28	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm
PYUSHSL30	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm
PYUSHSL32	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm
PYUSHSL35	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm
PYUSHSL38	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm
PYUSHSL41	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm
PYUSHSL44	UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm

UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring

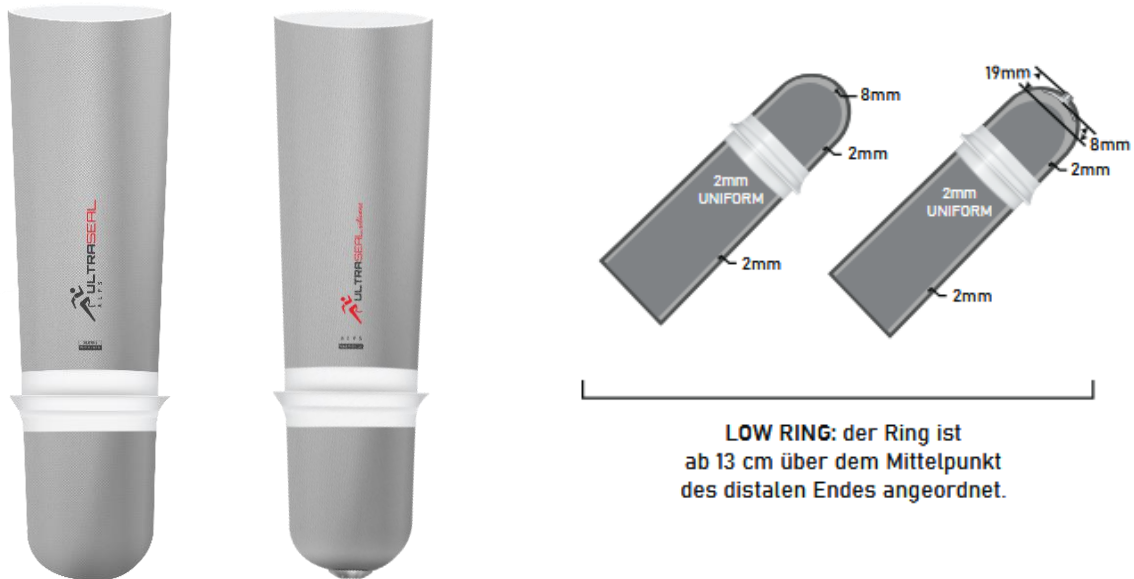


UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit mittlerem Ring, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSLSC20	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm
PYUSLSC22	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm
PYUSLSC24	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm
PYUSLSC26	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm
PYUSLSC28	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm
PYUSLSC30	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm
PYUSLSC32	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm
PYUSLSC35	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm
PYUSLSC38	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm
PYUSLSC41	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm
PYUSLSC44	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm

UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit mittlerem Ring, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSLSL20	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm
PYUSLSL22	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm
PYUSLSL24	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm
PYUSLSL26	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm
PYUSLSL28	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm
PYUSLSL30	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm
PYUSLSL32	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm
PYUSLSL35	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm
PYUSLSL38	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm
PYUSLSL41	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm
PYUSLSL44	UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm

UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring

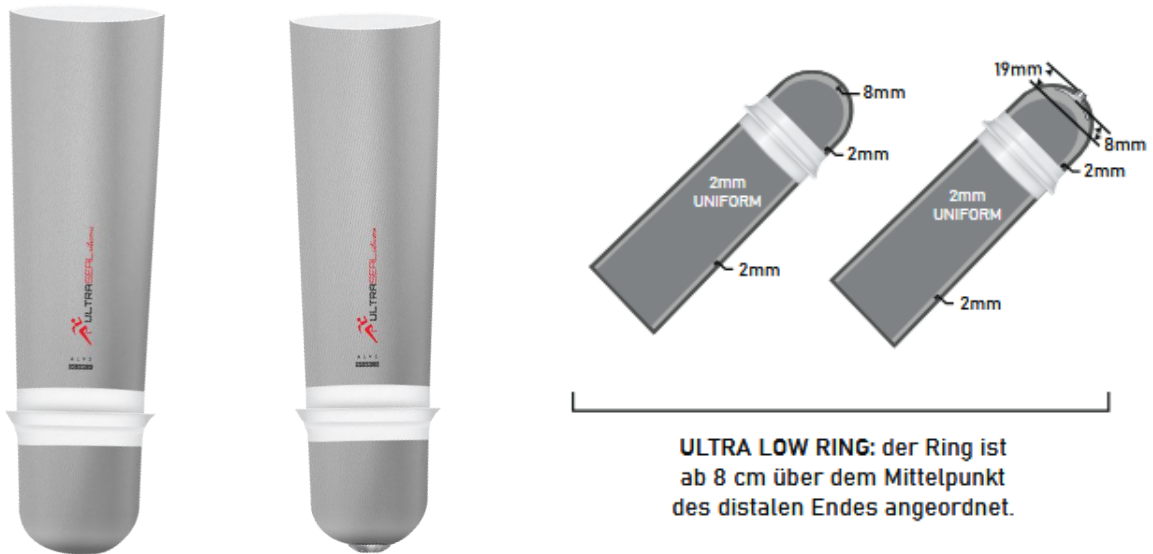

UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit niedrigem Ring, ohne Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSUSC20	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm
PYUSUSC22	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm
PYUSUSC24	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm
PYUSUSC26	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm
PYUSUSC28	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm
PYUSUSC30	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm
PYUSUSC32	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm
PYUSUSC35	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm
PYUSUSC38	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm
PYUSUSC41	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm
PYUSUSC44	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm

UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit niedrigem Ring, mit Pinanschluss

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSUSL20	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm
PYUSUSL22	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm
PYUSUSL24	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm
PYUSUSL26	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm
PYUSUSL28	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm
PYUSUSL30	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm
PYUSUSL32	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm
PYUSUSL35	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm
PYUSUSL38	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm
PYUSUSL41	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm
PYUSUSL44	UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm

Pro-Seal Silikon Dichtlippe



(inkl. Silikonkleber)

Die Pro-Seal Silikon Dichtlippe sorgt für eine bessere Haftung bei Versorgungen der unteren- und oberen Extremitäten, in Verbindung mit einem Liner mit Außengewebe und einem Ventil mit aktiver Öffnung

Pro-Seal Silikon Dichtlippe

Artikelnummer	Beschreibung
PY44014	Pro-Seal Silikon Dichtlippe für Liner Größe 14 – 22 cm, inkl. Silikon-Spezialkleber
PY44022	Pro-Seal Silikon Dichtlippe für Liner Größe 22 – 30 cm, inkl. Silikon-Spezialkleber
PY44030	Pro-Seal Silikon Dichtlippe für Liner Größe 30 – 38 cm, inkl. Silikon-Spezialkleber
PY44038	Pro-Seal Silikon Dichtlippe für Liner Größe 38 – 46 cm, inkl. Silikon-Spezialkleber

Silikon Kniekappen

Silikon Vakuum Kniekappe „Solar“, mit Gleitbeschichtung, lang, schwarz, Länge: 34cm



Artikelnummer	Größe	Umfang 15cm über Patella
PY0521XSs	X-Small	35cm – 41cm 34cm lang
PY0521Ss	Small	41cm – 49cm 34cm lang
PY0521Ms	Medium	49cm – 55cm 34cm lang
PY0521Ls	Large	55cm – 62cm 34cm lang

Silikon Vakuum Kniekappe „Lunar“, mit Gleitbeschichtung, kurz, schwarz, Länge: 25cm



Artikelnummer	Größe	Umfang 15cm über Patella
PY0522Ms	Medium	49cm – 55cm 25cm lang
PY0522Ls	Large	55cm – 62cm 25cm lang

Silikon 2-Fach Vakuum Kniekappe „Eclipse“, mit Gleitbeschichtung



Bestehen aus zwei Kniekappen, 1x Lang und 1x Kurz, so dass die „Eclipse“ besonders gut für Vakuumsysteme geeignet ist.

Farbe: Schwarz oder Beige

Artikelnummer	Größe	Farbe	Umfang 15cm über Patella
PY052016	MEDIUM	Beige	49cm – 55cm
PY052017	LARGE	Beige	55cm – 62cm
PY052019	MEDIUM	Schwarz	49cm – 55cm
PY052020	LARGE	Schwarz	55cm – 62cm



Gel Kniekappen

SFX-Flex Kniekappe, 30° Vorflexion, Gel mit Außengewebe

Artikelnummer	Größe	Umfang 10 cm über Patella
PY06203G	Gr. 20	34 – 37 cm
PY06233G	Gr. 23	36 – 39 cm
PY06263G	Gr. 26	38 – 42 cm
PY06293G	Gr. 29	41 – 46 cm
PY06323G	Gr. 32	45 – 50 cm



RFX-Flex Kniekappe, 30° Vorflexion, Farbe: Grau, mit Verstärkung

Artikelnummer	Größe	Umfang 10 cm über Patella
PY07203	XS	Proximal: 34 – 37 cm
PY07233	S	Proximal: 36 – 39 cm
PY07263	M	Proximal: 38 – 42 cm
PY07293	L	Proximal: 41 – 46 cm
PY07323	XL	Proximal: 45 – 50 cm



RFX-Flex Kniekappe, 30° Vorflexion, Farbe: Schwarz, mit Verstärkung

Artikelnummer	Größe	Umfang 10 cm über Patella
PY07203S	XS	Proximal: 34 – 37 cm
PY07233S	S	Proximal: 36 – 39 cm
PY07263S	M	Proximal: 38 – 42 cm
PY07293S	L	Proximal: 41 – 46 cm
PY07323S	XL	Proximal: 45 – 50 cm



Zubehör für Liner-Versorgungen



PY009X5 – Wasch- und Reinigungs-Lotion für empfindliche Haut (473ml)

Die ALPS Waschlotion für Prothesenträger ist ein nicht alkalisches Reinigungsmittel ohne Seife, welche für die Handwäsche von Prothesenlinern und Kniekappen geeignet ist. Auch Anwender mit besonders empfindlicher Haut, schätzen die sanft reinigende Lotion, denn sie ist ideal zum Waschen der Hautregionen, welche im direkten Kontakt mit der Prothese stehen, geeignet.

PY009x4 – Skin Lotion für empfindliche Haut bei Liner Anwenden (118ml)

Die ALPS Skin Lotion besteht zu 100% aus Silikon und macht trockene und empfindliche Haut wieder geschmeidig. Diese hypoallergene Lotion enthält keine Duft- und Farbstoffe, sie hinterlässt auf der Haut kein Ölgefühl und eine kleine Menge davon reicht aus, um trockene und strapazierte Haut zu beruhigen.

PY009X6 – Anziehhilfe Spray für Liner (443ml)

Das ALPS Anziehhilfe Spray hilft beim Anziehen von Linern. Es erleichtert den Anwendern den Anziehvorgang, indem es das Hineingleiten in den Liner vereinfacht.

PY009X10 – Anti Perspirant Spray (118ml)

2. Ventile

Unterschenkel Ventile



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0085	Expulsive Ventil Unterschenkel	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1S162	Unterschenkel Automatik-Ventil mit Gewinde M10 und blauem Knopf	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYI3000	One Way Ventil, Aluminium	Stück

XP Unterschenkelventile



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV3201	XP Mini US-Ventil mit Automatik-Ausstoß	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV3204	XP Unterschenkelventil mit Automatik-Ausstoß und Druckknopf	Stück

eValve Ventile

Das eValve ist eines der kleinsten und leichtesten Ventile, welche für Unterschenkelssysteme entwickelt wurde. Es ist herausnehmbar und die Kugel kann entfernt und gereinigt werden.

Darüber hinaus verfügt das Ventil über einen Filter, um eine einwandfreie und lange Funktion zu gewährleisten.

Das eValve ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich; als Laminierversion, um es direkt in den Prothesenschaft einzulaminieren, oder als Klebeversion mit einem Klebeadapter, um es in ein Ø10mm Bohrloch einzukleben.

eValve Laminierversion



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0083	eValve Laminierversion	Stück

eValve Klebeversion



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0082	eValve Klebeversion	Stück

eValve Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0080	eVentil	Stück
PYV0084	eValve Ersatzfilter 10 Stück	Pack

Oberschenkel Ventile



PP1S163



PP1S164


Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1S163	Oberschenkelventil Automatik oder Manuell Ausstoß	Stück
PP1S164	Werkzeug für Oberschenkelventil	Stück

XP Oberschenkelventil



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV3206	XP Oberschenkelventil mit Automatik-Ausstoß und Druckknopf	Stück

Expulsive Ventil

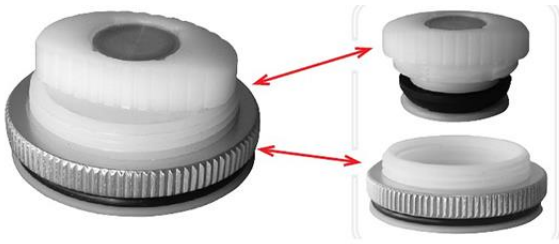

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0086	Expulsive Ventil Oberschenkel	Stück

Silikon Flachventil



PP1X16



PP1X47



PP1X4750

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1X16	Silikon Flachventil mit Ausstoß, 30 mm (ohne Ventilring)	Stück
PP1X47	Ventil-Ring Einschraubset, austauschbar für Kunststoffschaft, inkl. Dummy	Stück
PP1X4750	Werkzeug (Tiefziehhilfe für Dummy)	Stück

3. Locks und Verschiebeadapter

Clutchlock Systeme

Carbon Pro X Clutchlock



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH4105S	Carbon Pro X Clutchlock Original – schwarz – Komplettsset	Stück

Aluminium Clutchlock mit Links-Gewinde



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH3120	Clutchlock 3120, Aluminium Gehäuse, Links-Gewinde	Stück

Modular Clutchlock



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYI7250	Shuttle Lock Kunststoff, weiß, wasserfest	Stück

Shuttle Lock



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYI7300	Modular Clutchlock	Stück

Modular Clutchlock inkl. Eingußtasche




Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH4109GE	Modular Clutch Lock schwarz, inkl. Eingußtasche	Stück
PYH4109GED	Dummy für Modular Clutch Lock	Stück

OT Socket Fix



Einzugssystem für Liner Hauptmerkmale des OT Socket Fix

- 27g Gewicht
- 30mm Aufbauhöhe
- Formschlüssig mit Linern
- Patientenfreundliche Anwendung
- Optisch ansprechendes Design
- Leichter Einbau
- Gurtlänge 64,5cm

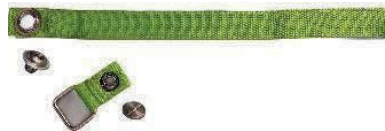

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH4111	OT Socket Fix	Stück
PYH4113	OT Socket Fix Gurt mit Umlenker	Stück
PYH4114	OT Socket Fix Schraubenset	Stück

MAG Lock



Dummy und Magnetscheibe sind nicht im Set enthalten!

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufbauhöhe	Gewicht	Einheit
PYH3180M	MAG Lock 2.0 30 kg Zugkraft	2,2 cm	278 Gramm	Stück
PYH3180-1M	MAG Lock 2.0 Dummy			Stück
PYH3181MP	MAG Lock Plus 2.0 40 kg Zugkraft	2,72 cm	312 Gramm	Stück
PYH3181-1M	MAG Lock Plus 2.0 Dummy			Stück
PYHDSTC	Magnetscheibe für MAG Lock			Stück

Clutchlock mit 3 Arm Laminieradapter



- Lock mit 3 Arm Laminieradapter
- Leichtgängige Mechanik
- Inkl. Pyramide und Rasterstift
- Bis 100kg Patientengewicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1S145	Lock mit 3 Arm Laminieradapter, Pyramide, Rasterstift, bis 100kg Patientengewicht	Stück

Verschiebeadapter Titan



- Verschiebeadapter aus Titan
- Inkl. Pyramidenaufnahme
- Inkl. Rohradapteraufnahme
- Verschiebebereich +/- 11mm
- Bis 100kg Patientengewicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01219T	Verschiebeadapter Titan, Pyramidenaufnahme, 30mm Rohraufnahme, bis 100kg Patientengewicht	Stück

4. Click Drehverschlüsse

RevoFit[®] und RevoLock[®] mit Click[®] Reel



- **Kraftvoll durch zwei Übersetzungsmodi!**
Schnelle Kordelaufnahme durch die 1:1 Übersetzung, welche automatisch in den 7:1 Power Modus umschaltet, um mehr Leistung und eine präzisere Anpassung zu ermöglichen
- **Mikro-Anpassungen** im Power Modus durchs Anziehen und Lösen der Kordel



Robust – Metallkomponenten gewährleisten Sicherheit und eine lange Lebensdauer



- **Kordeleinzugsystem für Liner**
- Zum Einlaminieren
- Erhältlich in zwei Versionen
 - 4-Loch Kit / V3 Lanyard
- Für das 4-Loch Kit wird ein extra Werkzeug benötigt



- **Für Anwender mit Volumenschwankungen**
- Zum Einlaminieren
- Verschiedenste Verarbeitungsmöglichkeiten, passend für jedes Schaftsystem
- Optimale Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Übersetzungsmodi



- **Für Anwender mit Volumenschwankungen**
- Zum nachträglichen Ergänzen bei vorhandenen Prothesen
- Für Probeschäfte, gedruckte Schäfte und Orthesen

RevoFit Lamination Kit mit Click Reel



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PRF2000701	RevoFit® Lamination Kit mit Click® Reel	Stück

RevoLock Lanyard V3 Kit mit BOA Dial



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PRL3022201	RevoLock® Lanyard V3 Kit with BOA® Dial	Stück

RevoLock Lanyard V3 Kit mit BOA Dial PLUS Basis



- In diesem Set ist eine weitere Basiskomponente enthalten (Lamination Collar)

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PRL3022204	RevoLock® Lanyard V3 Kit with BOA® Dial PLUS Basis PRP200	Stück

RevoLock Lanyard V3 Kit mit BOA Dial PLUS Linerschraube



- In diesem Set ist eine feste Linerschraube enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PRL3022205	RevoLock® Lanyard V3 Kit with BOA® Dial PLUS Linerschraube	Stück

RevoLock 4-Hole Kit mit Click Reel



RevoLock Tool Form Kit

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PRL3000701	RevoLock® 4-Hole Kit mit Click® Reel (Kordeleinzug, 4 Loch)	Stück
PRL3100001	RevoLock® Tool Form	Stück

QuickFit Strap



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK141013005	QuickFit™ Strap 1,5"-38mm schwarz	Stück

QuickFit Buckle



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK141500005	QuickFit™ Buckle 1,5"-38mm schwarz Magnetverschluss	Stück

5. Modulareile

Schraubadapter Titan



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1212T	Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 170kg, wasserfest	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1212T-W	Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 170kg, wasserfest, mit Ablaufnut	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1222T	Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 170kg, wasserfest, 5mm versetzt	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1242T	Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 136kg, wasserfest, 10mm versetzt	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1213T	Schraubadapter, Titan, 30mm, wasserfest, bis 100 kg , 10° abgewinkelt	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01753T	Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 125kg, höhenverstellbar um 12mm, Nur zur Anprobe!	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO15T	Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 125kg	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO15A	Schraubadapter, Aluminium, bis 100kg	Stück

Rohradapter



WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1211T-1-W	Rohradapter, Titan, 30x400mm, bis 136kg, wasserfest, mit Ablaufnut	Stück



WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1211T	Rohradapter, Titan, 30x400mm, bis 170kg, wasserfest	Stück



WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1241T	Rohradapter, Titan, 30x273mm, bis 170 kg, wasserfest, LowProfile	Stück



Titan



Aluminium

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO400A	Rohradapter Aluminium, 400mm, bis 100 kg	Stück
PYO250A	Rohradapter Aluminium, 250mm, bis 100 kg	Stück
PYO400T	Rohradapter Titan, 400mm, bis 125 kg	Stück
PYO250T	Rohradapter Titan, 250mm, bis 125 kg	Stück

Schaftadapter Titan



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PCA4HPHTe	Schaftadapter mit Pyramide, Titan, bis 170kg, wasserfest	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01727T	Schaftadapter mit Pyramide, Titan, wasserfest, bis 170 kg, 6,5mm diagonal versetzt	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01717T	Schaftadapter mit Pyramide, Titan, wasserfest, bis 170kg, axial versetzt	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO20T	Schaftadapter 4-Loch mit Pyramidenaufnahme, Titan, bis 125kg, drehbar	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO18T	Schaftadapter 4-Loch mit Pyramide, Titan, bis 125kg, drehbar	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO28T	4-Arm Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme, Titan, bis 125kg, drehbar	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO27T	4-Arm Schaftadapter mit Pyramide, Titan, bis 125kg, drehbar	Stück

Modularteile Titan



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1214T	Schaftadapter-Basis, Titan, 4-Loch, wasserfest, bis 170 kg, mit M36 Gewinde	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01704	Justier-Versetzadapter, Titan, wasserfest, bis 136 kg, mit M36 Gewinde	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01725	Pyramiden-Versetzadapter, Titan, bis 136kg, wasserfest, mit M36 Gewinde	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1K202	Einguß-Adapter, Titan, wasserfest, Pyramide, bis 170kg, Für Unterschenkel	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1216T-W	Pyramidenaufnahme, Titan, wasserfest, bis 170kg, mit M36 Gewinde und Ablaufnut	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1225T	Pyramideneinsatz, Titan, wasserfest, bis 170kg, mit M36 Gewinde	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01705	Klemmaufnahme für Justier-Versetzadapter, Titan, wasserfest, bis 170kg, mit M36 Gewinde	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYE024S	Pyramidenaufnahme, bis 125kg, mit M36 Außengewinde	Stück

Holz-Schaftansatz



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1K01	Holz-Schaftansatz, bis 100kg, 35x120mm	Stück

Doppeladapter Titan



Artikelnummer	Max. Patientengewicht	Material	Gewicht	Aufbauhöhe
PCADRT35e	170 kg	Titan	88 g	32 mm
PCADRT45e	170 kg	Titan	99 g	45 mm
PCADRT60e	170 kg	Titan	113 g	60 mm
PCADRT75e	170 kg	Titan	126 g	75 mm



Artikelnummer	Max. Patientengewicht	Material	Gewicht	Aufbauhöhe
PYO23T32	125 kg	Titan	86 g	32 mm
PYO23T45	125 kg	Titan	100 g	45 mm
PYO23T60	125 kg	Titan	110 g	60 mm
PYO23T75	125 kg	Titan	118 g	75 mm


Doppeladapter Titan, höhenverstellbar



- **Für den Dauereinsatz zugelassen!**
- Mit Skala zum einfachen Einstellen
- Aufbauhöhe von 7,0 bis 9,0 cm
- Inkl. beidseitiger Pyramidenaufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01752T	Doppeladapter, Titan, bis 136kg, bds. Pyramidenaufnahme, 20mm höhenverstellbar	Stück

Verschiebeadapterplatte, zweifach

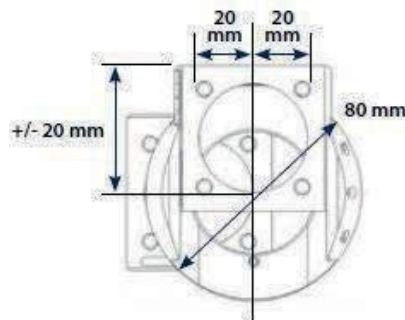

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYAC61	Verschiebeadapterplatte, Alu./Edelstahl, Gewicht 250g, bis 100kg, Zweifach +/- 20mm	Stück

Verschiebeadapter 4-Loch



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01718T	Verschiebeadapter, Titan, bis 100kg, 4-Loch mit Pyramidenaufnahme	Stück

3-Arm Adapter, wasserfest



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01221W	3-Arm Adapter mit flexiblen Armen, bis 136kg, Gewicht 66g, wasserfest, mit M36 Gewinde	Stück

Zusätzlich erhältlich:



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1K202	Einguß-Adapter, Titan, wasserfest, Pyramide, bis 170kg, Für Unterschenkel	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1216T-W	Pyramidenaufnahme, Titan, wasserfest, bis 170kg, mit M36 Gewinde und Ablaufnut	Stück

3-Arm Adapter, drehbar



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA-P17	3-Arm Schaft-Drehadapter, Stainless Steel, bis 136kg, Gewicht 184g, mit Pyramide	Stück
PYA-P18	3-Arm Schaft-Drehadapter, Stainless Steel, bis 136kg, Gewicht 184g, mit Pyramidenaufnahme	Stück
PYA-P19	3-Arm Schaft-Drehadapter, Stainless Steel, bis 136kg, Gewicht 184g, mit M36 Gewinde	Stück

4-Arm Adapter



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1421S	4-Arm Eingußadapter, Edelstahl, bis 136kg, Gewicht 159g	Stück

System- und Eingußscheiben



Dummy ist nicht enthalten!

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH1243	Alu Eingußscheibe, bis 136kg	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH4224D	Dummy für Alu Eingußscheibe PYH1243	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH1274A	Systemscheibe, Aluminium, bis 100kg, versetzbar um 9mm, 18mm und 27mm	Stück

Drehadapter 360°



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA120e	Drehadapter Torsion 360°, bis 125kg	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1423	Rotations Drehadapter, bis 100kg, mit Pyramide	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1425	Rotations Drehadapter, bis 100kg, mit M36 Gewinde	Stück

eAdjust



- **Unbegrenzte Rotation!**
- Abwinkeln von bis zu 11°
- Max. Patientengewicht von 125kg
- Wasserbeständig
- Horizontaler Versatz von insgesamt 23mm möglich
- Ermöglicht ein einfaches Einstellen der Prothese, ohne diese auseinander bauen zu müssen!

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYE500HP	eAdjust Verstelladapter, Titan, bis 125kg	Stück

6. Heavy Duty Produkte

Carbon Rohr HD



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1209C	Carbon Rohr, 34x305 mm, bis 170 kg, ohne Schraubadapter	Stück

Carbon Rohr HD



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA05209C	Carbon Rohr, 34x305 mm, bis 227 kg, ohne Schraubadapter	Stück

Schraubadapter SS HD



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PCAHTCS34	Schraubadapter HD, SS, 34 mm, bis 181 kg	Stück

Schraubadapter Titan HD



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA05212T	Schraubadapter Titan, 34mm, bis 227 kg, wasserfest	Stück

Eingußadapter Titan HD



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA05220T	Eingußadapter, Titan, mit Pyramide, bis 227 kg, wasserfest	Stück

HD 500 Foot



- Bis 227 kg
- MOB 1
- Fest integrierte Pyramide
- 10mm Absatzhöhe
- Aufbauhöhe (bei Gr. 27): 86 mm
- Gewicht (bei Gr. 27): 812 g

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1150-XXx	HD 500 Foot, Pyramide ist fest integriert, bis 227kg	Stück

7. Prothesenfüße

Meracus



Technische Daten

MOB	2 – 3
Größen	23 – 28
Garantie	3 Jahre
Gewicht ohne Kosmetik (bei Gr. 25)	375,5 g
Gewicht mit Kosmetik (bei Gr. 25)	590,5 g

Wasserfest

Nach jeder Verwendung in Salz-, Chlor- oder Süßwasser ausspülen;
auch nach Kontakt mit Sand o.Ä.

Aufbauhöhen in mm

23 – 24	133 mm
25 – 26	140 mm
27 – 28	144 mm

100% Verbundwerkstoff-Design für ein nahtloses Lauferlebnis

Meracus® ist ein dynamischer Reaktionsfuß, der sich durch eine niedrige Bauhöhe, einen J-förmigen Kiel, einen verlängerten Fersenhebel, eine Rollenform und eine einzigartige Innovation zur Verbindung von Ferse und Kiel aus 100% Verbundwerkstoff auszeichnet. Die dynamischen Eigenschaften des **Meracus®**-Fußes simulieren den anatomischen Fuß, indem sie eine Stoßdämpfung beim Fersenauftritt, einen reibungslosen Übergang zu einer stabilen Standphase, ein sanftes Abrollen des Vorfußes und eine effiziente Energierückgabe beim Abstoß ermöglichen.

Max. Gewicht Größe	60kg	80kg	100kg	125kg	150kg
23	23P3	23P4	23P5	-	-
24	24P3	24P4	24P5	24P6	-
25	25P3	25P4	25P5	25P6	25P7
26	26P3	26P4	26P5	26P6	26P7
27	27P3	27P4	27P5	27P6	27P7
28	-	28P4	28P5	28P6	28P7

Artikelnummer	Bezeichnung	Zusammensetzung der Artikelnummer
PAL29000xxPx	Meracus One Fuß	xx = Größe, Px = Gewichtskategorie
PAL29002xxX	Meracus One Kosmetik	xx = Größe, X = Seite (L/R)
PAL29006	Meracus One Spectra Socke	-

Beispiel:

PAL2900025P5 = Meracus One in Gr.25 bis max. 100kg

PAL2900225R = Meracus One Kosmetik in Gr. 25 für die rechte Seite

Lunaris Essential



Technische Daten

Impact Level	Niedrig – Moderat
Größen	24 – 30
Max. Gewicht	110 kg
Bewegungsumfang	Bis zu 27°
Keine Elektronik	
Nur IO und IO+ Versionen	
Spritzwasser geschützt	
Klassifikation IP44	

Einfach – Für alle zugänglich

Der **Lunaris Essential** wurde für alle entwickelt, die Wert auf Einfachheit legen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Inspiziert vom **Lunaris IO**, bietet er wesentliche Funktionen für ein dynamisches und komfortables Lauferlebnis. Mit seinem eleganten Design bietet dieses Modell Stabilität und Komfort bei allen Aktivitäten und ist eine leistungsstarke Lösung.



Natürliche Gangart: Ahmt das Gehen eines gesunden Menschen genau nach.



Unmittelbarer Komfort: Geringere Ermüdung, auch auf unterschiedlichem Terrain.



Vielseitig für alle Benutzer: Nachgewiesene Vorteile für verschiedene Amputationsgrade.

Größe	Impact Level	Körpergewicht (kg)						
		45 – 59	60 – 66	67 – 73	74 – 81	82 – 90	91 – 100	101 - 110
24 – 30	Niedrig	C2	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	Moderat	C2	C3	C4	C5	C6	C7	n/v

Artikelnummer: PLES001C x 2 x X

Zusammensetzung

der Artikelnummer: C x = Kategorie, 2 x = Größe, X = Seite (L/R)

Lunaris IO



Technische Daten

Impact Level	Niedrig – Moderat
Größen	24 – 30
Max. Gewicht	110 kg
Bewegungsumfang	Bis zu 39°
Intelligente Elektronik	
Inkl. Mobile App mit Dateneinblick	
Staub- und Wasserbeständigkeit	
Klassifikation IP54	

Für Leistung gebaut – Für Sicherheit gemacht

Der **Lunaris IO** bietet erweiterte Mobilität, Komfort und Stabilität mit einem Bewegungsbereich von 39° und integrierter Elektronik für wertvolle Daten.

Neben der Verwendung hochwertiger Materialien, die für ihre herausragende Leistung bekannt sind, zeichnet sich der **Lunaris** durch weitere wichtige Merkmale aus, die das Benutzererlebnis verbessern:



Lunaris bietet anpassbare Flexibilitätsoptionen, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden



Bietet Torsions- und Stoßdämpfung durch das 3D-gedruckte Cover



Erhältlich in verschiedenen Farbtönen, passend zu Stil und Stimmung

KI-gestützte Datenerfassung

Ein herausragendes Merkmal der **Lunaris IO und IO+** ist ihre Fähigkeit, Daten mit beeindruckender Geschwindigkeit zu erfassen und zu verarbeiten. Ausgestattet mit 14 eingebetteten Sensoren sammelt die Prothese Daten mit einer Rate von 500 Samples pro Sekunde - fünfmal schneller als die meisten in der Forschung verwendeten biomechanischen Datensysteme. Diese Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung bietet detaillierte Einblicke, die den Benutzern helfen, ihre Leistung besser zu verstehen und ihre Mobilität zu optimieren.

Artikelnummer: PLUN001

Da jeder Fuß individuell an die Eigenschaften und Bedürfnisse des Anwenders angepasst wird, gibt es für den Lunaris IO nur eine Artikelnummer. In dieser sind alle Produkte (Fuß, Spectra Socke und Kosmetik) enthalten.

Lunaris IO+



Technische Daten

Impact Level	Niedrig – Moderat
Größen	24 – 30
Max. Gewicht	110 kg
Bewegungsumfang	Bis zu 39°
Intelligente Elektronik	
Inkl. Mobile App mit Dateneinblick	
Staub- und Wasserbeständigkeit	
Klassifikation IP54	
Prädiktive Wartung	
Inkl. Anpassungen und Updates	

Laufend besser – Immer an der Spitze

Für diejenigen, die ein noch besseres Lauferlebnis suchen, bietet die Lunaris IO+ Option, welche auf dem Lunaris IO aufbaut, kontinuierliche Updates und erweiterte Funktionen, die langfristigen Komfort und eine sich weiterentwickelnde Technologie bieten, die im Laufe der Zeit mit Ihren Bedürfnissen wächst.

Prädiktive Wartung für langfristige Leistung

Ein Merkmal von Lunaris IO+ ist die vorausschauende Wartung, die dazu beiträgt, dass die Prothese immer die bestmögliche Leistung erbringt. Durch die Erkennung potenzieller Probleme, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln, verlängert die vorausschauende Wartung die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgt für kontinuierliche Zuverlässigkeit.

Personalisierte Prothetik für sich verändernde Lebensstile

Ein weiterer entscheidender Vorteil des Lunaris IO+ ist seine Fähigkeit, sich an Ihren sich ändernden Lebensstil anzupassen. Ganz gleich, ob Ihr Gewicht schwankt, sich Ihr Aktivitätsniveau ändert oder Sie vorübergehende körperliche Veränderungen erfahren, Lunaris IO+ kann an Ihre sich verändernden Bedürfnisse angepasst werden.

Von der Änderung der Gewichtsklassen bis hin zur Anpassung an unterschiedliche Aktivitätsniveaus stellt Lunaris IO+ sicher, dass sich Ihre Prothese nahtlos an Ihren Lebensstil anpasst und ein wirklich individuelles Erlebnis bietet.

Artikelnummer: PLUP001

Da jeder Fuß individuell an die Eigenschaften und Bedürfnisse des Anwenders angepasst wird, gibt es für den Lunaris IO nur eine Artikelnummer. In dieser sind alle Produkte (Fuß, Spectra Socke und Kosmetik) enthalten.

Endurance Contour



Technische Daten

MOB	2 – 3
Größen	24 – 28
Aufbauhöhe	147 – 175 mm
Absatzhöhe	10 mm
Garantie	3 Jahre
Inkl. Spectra Socke und Kosmetik	

Der **Endurance Contour**-Fuß ist ideal für aktive Nutzer und sorgt für einen geschmeidigeren Gang ohne den Energieverlust, der typischerweise mit Carbonfaser-Fußsystemen verbunden ist. Sein einzigartiges Design mit abgewinkelter Spitze und nicht flachem Kiel vergrößert die Länge der Carbonfaserfeder, was die Energierückgabe maximiert und eine gleichmäßige Laufbewegung gewährleistet. Der geteilte Kiel sorgt für eine hervorragende Inversion/Eversion, die das Gehen auf unebenem oder geneigtem Gelände ermöglicht. Der **Endurance Contour** ist leicht, einfach zu montieren und hat ein kosmetisch ansprechendes Profil, so dass er leicht zu bedecken ist.



Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	Kat.
PYA1123	24-28	L/R		3-5

Kategorie Größe	Maximales Patientengewicht		
	3	4	5
24	75 – 90 kg	N/A	N/A
25	75 – 90 kg	91 – 150 kg	N/A
26	75 – 90 kg	91 – 150 kg	N/A
27	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg
28	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg

Endurance HP



Technische Daten

MOB	2 – 3
Größen	24 – 28
Aufbauhöhe	147 – 175 mm
Absatzhöhe	10 mm
Garantie	3 Jahre
Inkl. Spectra Socke und Kosmetik	

Der **Endurance** Prothesenfuß bietet dem Benutzer eine Kombination aus Komfort und Dynamik, die einen natürlichen Gang mit weniger Ermüdung und letztlich weniger Belastung des unteren Rückens und der gesunden Seite ermöglicht. Die geteilte Feder und die Fersenkonstruktion verbessern die Eversion- und Inversions-Bewegung. Die Karbonfaserkonstruktion fördert die Umwandlung des gewichtsbelastenden Energieinputs in Energieoutput.



Artikelnummer: **Größe** **Seite** **P-Gewicht** **Kat.**
PYA1116-C **24-28** **L/R** **3-5**

Kategorie Größe	Maximales Patientengewicht		
	3	4	5
24	75 – 90 kg	N/A	N/A
25	75 – 90 kg	91 – 150 kg	N/A
26	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg
27	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg
28	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg

Endurance LP



Technische Daten

MOB	2 – 3
Gewicht (Bei Gr. 27)	585 g
Aufbauhöhe	68 mm
Absatzhöhe	10 mm
Garantie	3 Jahre
Inkl. Spectra Socke und Kosmetik	

Der **Endurance** Prothesenfuß bietet dem Benutzer eine Kombination aus Komfort und Dynamik, die einen natürlichen Gang mit weniger Ermüdung und letztlich weniger Belastung des unteren Rückens und der gesunden Seite ermöglicht. Die geteilte Feder und die Fersenkonstruktion verbessern die Eversion- und Inversions-Bewegung. Die Karbonfaserkonstruktion fördert die Umwandlung des gewichtsbelastenden Energieinputs in Energieoutput.



Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	Kat.
PYA1115-C	24-28	L/R		3-5

Kategorie Größe	Maximales Patientengewicht		
	3	4	5
24	75 – 90 kg	N/A	N/A
25	75 – 90 kg	91 – 150 kg	N/A
26	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg
27	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg
28	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg

Prime



Technische Daten

MOB	1 – 2
Größen	23 – 28
Gewicht (bei Gr. 26)	620 g
Aufbauhöhe (bei Gr. 26)	73 mm
Absatzhöhe	10 mm
Garantie	3 Jahre
Max. Gewicht	125 kg

Der **Prime** bietet K2-Nutzern einen hochfunktionalen Fuß mit einer Vielzahl von Funktionen unter Verwendung von High-End-Technologie. Das lauffreundliche Design sorgt für eine längere Flachfußdauer für mehr Leichtigkeit beim Gehen mit erhöhter Stabilität und extrem sanftes Abrollen durch den gebogenen Kiel.

Merkmale und Vorteile

- Niedriges Profil
- High-Tech-Verbundstoff für optimierte Bewegung
- Nachgiebige Ferse hilft bei erhöhter Laufstabilität
- Inklusive Fußkosmetik und Spectra-Socke Integrierte Pyramide



Artikelnummer:

PYA1119

Größe

23-28

Seite

L/R

Supreme



Technische Daten

MOB	2 – 3
Größen	24 – 28
Gewicht	480 g
Garantie	3 Jahre
Absatzhöhe	10 mm
Aufbauhöhe	150 mm
Max. Gewicht	125 kg

Wasserfest

Der **Supreme** bietet K2 bis K3 Nutzern einen vollständigen Carbon-Fuß, welcher für eine hohe Energierückgabe sorgt und einen reibungslosen Gangzyklus ermöglicht. Eine zusätzliche Carbonplatte absorbiert überschüssige Energie und erhöht die Lebensdauer des Produkts.

Auswahl der Gewichtskategorie

Gewicht	65 – 75 kg	75 – 85 kg	85 – 95 kg	95 – 105 kg	105 – 120 kg
Kategorie	1	2	3	4	5

Artikelnummer: **Kategorie** **Größe**
PYI1000C 1 - 5 23-28

Artikelnummer: **Farbe*** **Seite**
PYI h/b L/R

*Die Kosmetiken sind in Beige oder Braun erhältlich.

h = Beige, b = Braun

Troy Plus



Technische Daten

MOB	2 – 3
Größen	23 – 28
Garantie	2 Jahre
Max. Gewicht	130 kg
Ohne Kosmetik	

Der **Troy Plus** ist speziell für Anwender*innen im Bereich K2-K3 designt worden. Durch seine robuste und flexible Karbonstruktur bietet er dem Benutzer eine hohe Stabilität. Bedingt durch seine leichte Aufbauweise, ermöglicht der **Troy Plus** eine sichere und leichte Gehmöglichkeit für Benutzer mit mittlerem Aktivitätsgrad.

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	MOB
PY07W	23-28	L/R		2-3

Größe	23	24	25	26	27	28
Max. Gewicht	77 kg	100 kg		130 kg		
Kategorie	N/V	6		6		
	N/V	N/V	N/V	8		
MOB	2 – 3					

Die Kosmetik ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden!

Artikelnummer:	Größe	Seite
PY07F	23-28	L/R



BioStep EVO

Technische Daten

MOB	2 – 4
Größen	22 – 30
Garantie	3 Jahre
Gewicht ohne Kosmetik (bei Gr. 26)	840 g
Aufbauhöhe	170 mm
Absatzhöhe	10 mm
Inkl. Spectra Socke und Kosmetik	

Der leistungsstärkste Prothesenfuß aus der Familie **BioStep**. Ein echter Allrounder mit sehr guter Stoßdämpfung und verbesserter Sicherheit auf jedem Untergrund für einen abgefederten Kontakt mit dem Boden. Für anspruchsvolle, dynamische Anwender, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben. Ideal auch für Hiking und Trekking, sowie für Freizeitsport und Aktivitäten mit hoher Intensität. Natürlich, reaktiv und auf sanfte Weise unterstützend.

Hauptmerkmale


NRG™-Technologie



Mehrschichten- System


 Dynamische Wade &
Schienbein


Separate Grosszehe



Bewegungsumfang 26°



Axiale Drehbewegung 12°



Bessere Stoßdämpfung

Artikelnummer:
P1BSEVO
Größe

22-30

Seite

L/R

P-Gewicht

[Empty Box]

MOB

2-4

Kategorie Größe	Maximales Patientengewicht		
	K2	K3	K4
22	113 kg	102 kg	90 kg
23 – 24	113 kg	102 kg	102 kg
25 – 30	113 kg	102 kg	125 kg

BioStep PRO


Technische Daten

MOB	2 – 4
Größen	22 – 30
Garantie	3 Jahre
Gewicht ohne Kosmetik (bei Gr. 26)	730 g
Aufbauhöhe	150 mm
Absatzhöhe	10 mm
Inkl. Spectra Socke und Kosmetik	

Alle Vorteile der NRG-Technologie mit größerem Rotationsbewegungsspielraum. Für aktive Anwender, die sich viel im Freien aufhalten und deshalb Standsicherheit und die zusätzlichen Vorteile der Rotation wünschen. Auch geeignet für gelegentliche Sportaktivitäten in der Freizeit. Natürlich – Komfortabel – Reaktiv.

Hauptmerkmale


NRG™-Technologie



Mehrschichten- System


 Dynamische Wade &
Schienbein


Separate Grosszehe



Bewegungsumfang 26°



Axiale Drehbewegung 12°



Bessere Stoßdämpfung

Artikelnummer:
P1BSPRO
Größe
22-30
Seite
L/R
P-Gewicht

[Empty box]

Akt.
2-4

Kategorie Größe	Maximales Patientengewicht		
	K2	K3	K4
22 – 24	113 kg	101 kg	101 kg
25 – 30	183 kg	183 kg	147 kg

NextStep GlideAnkle




Technische Daten

MOB	2
Größen	23 – 28
Garantie	3 Jahre
Gewicht (bei Gr. 26)	508 g
Aufbauhöhe	97 mm
Absatzhöhe	10 mm
Inkl. Spectra Socke, ohne Kosmetik	

Merkmale und Vorteile

- 2° Dorsalflexion in der Schwungphase
- 15° Plantarflexion in der Standphase
- Reduzierung des Drehmomentes beim Fersenkontakt
- Erhöhte Kniestabilität
- Förderung des Vortriebs
- Kür aktive K2 Anwender
- Kosmetik in zwei Farben erhältlich (Beige und Braun)

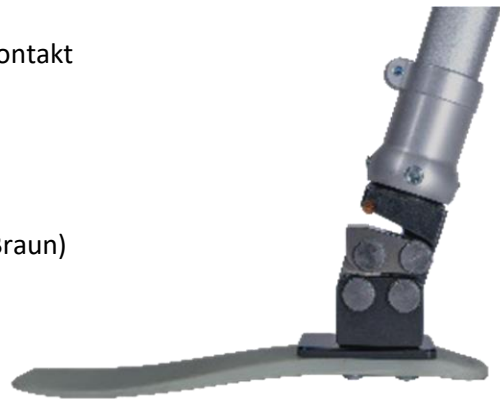

Artikelnummer: **Größe** **Seite** **P-Gewicht** **Kat.**
PYA1113 - **23-28** **L/R** **C4-C6**

Kategorie Größe	Maximales Patientengewicht		
	C4	C5	C6
23	80 kg	100 kg	N/A
24	80 kg	100 kg	N/A
25	80 kg	100 kg	125 kg
26	80 kg	100 kg	125 kg
27	N/A	100 kg	125 kg
28	N/A	100 kg	125 kg

Dazugehörige Kosmetik:

Artikelnummer: **Größe** **Seite**
PYA1114 - **23-28** **L/R**


Carbon Fuß F2



Technische Daten

MOB	2 – 3
Größen	22 – 28
Garantie	2 Jahre
Gewicht (bei Gr. 26)	770 g
Systemhöhe (bei Gr. 26)	93,5 mm
Aufbauhöhe	79 mm
Absatzhöhe	10 mm
Inkl. Spectra Socke und Kosmetik	

Die hervorragende Elastizität des **Carbon-Fußes F2**, sorgt für hohe Flexibilität und Komfort beim Gehen. Mit dem Multi-Achsialem-Knöchelgelenk bietet der Fuß eine bessere Propriozeption beim Gehen auf unebenen Oberflächen.

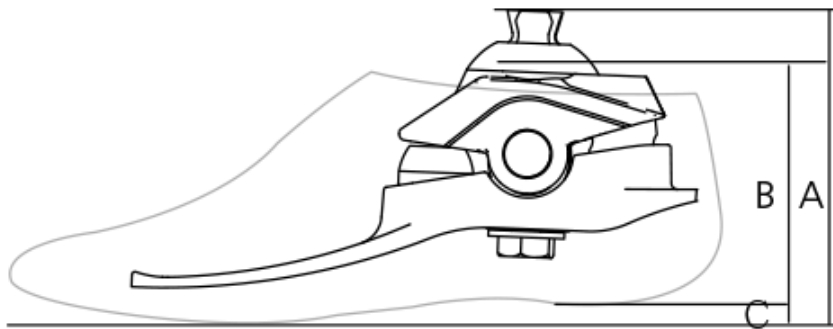

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	MOB
PCT02	22-28	L/R		2-3

Größe	22	23	24	25	26	27	28
Gewicht	650 g	690 g	735 g	755 g	770 g	805 g	830 g
Max. Gewicht	100 kg		125 kg				
Systemhöhe (A)	88 mm	91,5 mm	92,5 mm	93 mm	93,5 mm	94 mm	94,5 mm
Aufbauhöhe (B)	73,5 mm	77 mm	78 mm	78,5 mm	79 mm	79,5 mm	80 mm
Absatzhöhe (C)	10 mm		10 mm				
MOB	2 – 3		2 – 3				

Sachfuß


Technische Daten

MOB	1 – 2
Größen	22 – 28
Aufbauhöhe	84 – 99 mm
Absatzhöhe	10 mm
Max. Gewicht	100 kg

Kosmetik ist fest verbaut

Artikelnummer: **Größe** **Seite** **P-Gewicht** **MOB**
PMW1H2 22-28 L/R 1-2

Größe	22	23	24	25	26	27	28
Aufbauhöhe	84 mm	88 mm	90 mm	94 mm	96 mm	99 mm	
Max. Gewicht	100 kg						
Absatzhöhe	10 mm						
MOB	1 – 2						

Inklusive Anti-Rutsch-Sohle!


Syme


Technische Daten

MOB	1 – 3
Größen	24 – 28
Aufbauhöhe	45 mm
Absatzhöhe	10 mm
Garantie	2 Jahre
Gewicht (bei Gr. 27)	585 g
Inkl. Spectra Socke, ohne Kosmetik	

Achtung! Die Hebelkräfte des **Symes** können zu einer starken Belastung der angrenzenden Modulareile, einschließlich Schaftadapter, führen. Demzufolge ist es notwendig ausschließlich Adapter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 125 kg zu verwenden.

Es dürfen keine Aluminiumadapter verwendet werden, ausschließlich Titan!

Artikelnummer:
Gewicht
Größe
PYA1117C
5 / 6
25/26

Kategorie Größe	Maximales Patientengewicht	
	C5	C6
23/24	100 kg	-
25/26	100 kg	125 kg
27/28	-	125 kg

Dazugehörige Kosmetik:

Artikelnummer:
Größe
Seite
PYA1114 -
23-28
L/R

8. Kniegelenke

Leichtsperr Kniegelenk



- Empfohlen für MOB 1
- 1-Achs-Sperrknie
- 160° Flexion
- Gewicht: 281 g
- Bis max. 100 kg
- Aufbauhöhe 43,5 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1301E	Leicht-Sperr-Einachs-Kniegelenk, ALU + Pyramide, bis 100 kg	Stück

Polyzentrisches Kniegelenk mit Sperrhebel



- Empfohlen für MOB 1 – 2
- Wasserfest
- Gewicht: 480 g
- Bis max. 125 kg
- Aufbauhöhe 76 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PMW6H09B	Polyzentrisches Kniegelenk, ALU + Pyramide, bis 125 kg, wasserfest	Stück

Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre



- 145° Flexion
- Gewicht: 632 g
- Bis max. 136 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO68KL	Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre, bis 136 kg	Stück

Ein-Achs-Bremskniegelenk mit optionaler Sperre



- Bis max. 136 kg
- Gewicht: 562 g
- Aufbauhöhe 65 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYE046K136	Bremsknie mit optionaler Sperre, bis 136 kg	Stück

Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre



- Empfohlen für MOB 1 – 2
- Die Sperre kann nachträglich entfernt werden
- Prox. Anschluss kann um 2 mm A/P und M/L verschoben werden
- Prox. Anschluss ist drehbar
- Gewicht: 621 g
- Aufbauhöhe 108 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1M103	Poly 4-Achs-Kniegelenk mit optionaler Sperre, bis 125 kg	Stück

Polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung



- Prox. Anschluss kann um 2 mm A/P und M/L verschoben werden
- Prox. Anschluss ist drehbar
- Gewicht: 875 g
- Aufbauhöhe 172 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1P200ST	Pneumatik-Polyzentric-Modular-Knie 500 ST mit Pyramide, - 125 kg	Stück

Poly-Pneumatik-4-Achs-Knie mit manueller Sperre



- Aufbauhöhe 169,3 mm
- Gewicht: 875 g
- Bis max. 125 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1P2L1322	Poly-Pneumatik-4-Achs-Knie mit manueller Sperre, bis 125 kg	Stück

5-Achs-Knie mit Stance Flexion und optionaler Sperre



- Aufbauhöhe 112 mm
- Gewicht: 789 g
- Bis max. 125 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1M1324	5-Achs-Kniegelenk mit Stance Flexion und opt. Sperre, bis 125 kg	Stück

GeoLock Hydraulik Knie



- **MOB 2 – 3**
- Zwei verschiedene Modelle erhältlich (mit Pyramide oder M36 Gewinde)
- Geometrische Verriegelung
- Mechanische Standstabilität
- Leichter Zugang zur Flexion-/ Extension-Einstellung
- Konstrukt aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung
- Aufbauhöhe 155mm
- Bis max. 125 kg
- Gewicht: 851 g (mit Pyramide)
- Gewicht: 825 g (mit M36 Gewinde)

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1336	GeoLock Hydraulik Knie, Polyzentrisch, bis 125 kg, mit Pyramide	Stück
PYA1337	GeoLock Hydraulik Knie, Polyzentrisch, bis 125 kg, mit M36 Gewinde	Stück

Unitos Smart Kniegelenk



Sicherheit geht vor!

Das **Unitos Smart** wurde und wird für Oberschenkelamputierte Anwender entwickelt, welche ein großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Es ermöglicht dem Anwender kraftsparendes, physiologisches Gehen im Rahmen dessen Möglichkeiten. Es ist an den Therapieverlauf anpassbar, ohne dass der Anwender seine Ganggewohnheiten ändern muss.

Zielgruppe:

- Mob 1- und Mob 2- Amputierte
- Langsamgeher
- Ängstliche, unsichere Geher
- Amputierte mit begrenzter Kraft




Sitzfunktion:

Durch die Dorsalextension bei Kniebeugung ist es dem Anwender möglich, den Fuß vollflächig abzustellen, auch dann, wenn die Kniebeugung mehr als 90° beträgt.

Rollstuhlfunktion:

Beim Fahren mit dem Rollstuhl lässt sich das Kniegelenk gebeugt arretieren. Dies ermöglicht die Fortbewegung, ohne dass die Prothese am Boden schleift.



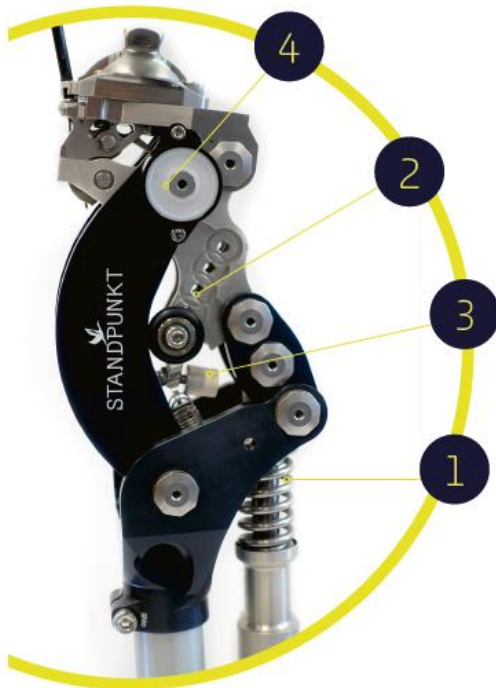

Artikelnummer:

PUS01...

Für den Erwerb und Einsatz des Unitos Smart Knies ist ein Zertifizierungsseminar erforderlich!

Beugewinkel/ Kniewinkel	Relative Beinverkürzung mit Endurance Fuß
1 (10 Grad)	-1,5 mm
2 (12 Grad)	-4 mm
3 (15 Grad)	-4,5 mm
4 (25 Grad)	-8 mm
5 (40 Grad)	-27 mm

Funktion 1

Dämpfung des Fersenauftritts und Plantarflexion bis 30°:

Das Knöchelgelenk ermöglicht eine Plantarflexion von bis zu 30° bei Lastaufnahme. Davon abgesehen, dass Anwender diese Funktion beim Gehen auf der Eben schätzen, dient diese Eigenschaft dem sicheren Bewältigen von Gefällen. Da es auch bei steileren Gefällen zu einem schnellen und vollflächigen Kontakt des Fußes kommt, können Bodenreaktionskräfte positiv beeinflusst werden. Dies hat zur Folge, dass die Prothese während der Standphase nicht ungewollt einbeugt.

Funktion 2

Beugelimitierung:

Ähnlich dem Prinzip bewegungslimitierender Knieorthesen, lässt sich die Beugung des Unitos Smart in fünf Stufen limitieren. So ist es für den Anwender möglich in einer sicheren Einstellungsvariante zu beginnen. Anfängliche Anwenderfehler haben keinen Sturz, auf Grund ungewollter Kniebeugung bei Lastaufnahme, zur Folge. Im Rahmen des Therapiefortschrittes kann dieser Kniebeugewinkel Schritt für Schritt erhöht werden. Eine Sperreinheit ermöglicht das Sitzen über manuelles Entriegeln.

Funktion 3

Einstellbare Achsgeometrie:

Um die Standphasensicherheit kontrollieren- und an den Anwender anpassen zu können, lässt sich die Achsgeometrie der Polyzentrik stufenlos verstellen. Ein Silikondämpfer dämpft die Endlage und erhöht den Gehkomfort.

Funktion 4

Schwunghasendämpfung:

Die Geschwindigkeit der Extensions- und Flexionsbewegungen in der Schwunghase lassen sich mit unterschiedlich starken Bremsseinheiten in sechs verschiedenen Stufen einstellen. Auf diese Weise lässt sich das Gangbild individuell an den Anwender anpassen.

9. Kinderpassteile

4-Achs Kinder Kniegelenk



- Polyzentrisches Kindekniegelenk
- Geringes Gewicht 320 g
- Aufbauhöhe ohne Pyramide 110 mm
- Für 22 mm Rohradapter
- Bietet ein hohes Maß an Sicherheit

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1M112e	Kinder Knie ST 4-Achs mit Pyramide, für 22 mm Rohr, bis 45 kg	Stück

10. Anziehhilfe und Stumpfstrümpfe

Anziehhilfe PowerPull



- Sehr dünner und leichter Stoff
- Geht leicht durch die Ventilöffnungen
- Auch für Randgrößen erhältlich
- Sehr strapazierfähig
- Ohne Schlaufe

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PKPP10-S	Anziehhilfe PowerPull, Prox. Umfang bis 40 cm, Gr. S	Stück
PKPP12-M	Anziehhilfe PowerPull, Prox. Umfang bis 50 cm, Gr. M	Stück
PKPP14-L	Anziehhilfe PowerPull, Prox. Umfang bis 60 cm, Gr. L	Stück
PKPP16-XL	Anziehhilfe PowerPull, Prox. Umfang bis 70 cm, Gr. XL	Stück

Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch



Nylon Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

100% Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-NY20W	US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 20 cm	Stück
PB-NY25W	US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 25 cm	Stück
PB-NY30W	US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-NY35W	US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-NY40W	US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-NY45W	US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 45 cm	Stück

Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-BW20W	US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 20 cm	Stück
PB-BW25W	US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 25 cm	Stück
PB-BW30W	US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-BW35W	US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-BW40W	US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-BW45W	US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 45 cm	Stück



Frottee Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-FR20W	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 20 cm, weiß	Stück
PB-FR25W	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 25 cm, weiß	Stück
PB-FR30W	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 30 cm, weiß	Stück
PB-FR35W	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 35 cm, weiß	Stück
PB-FR40W	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 40 cm, weiß	Stück
PB-FR45W	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 45 cm, weiß	Stück



Frottee Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-FR20S	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 20 cm, schwarz	Stück
PB-FR25S	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 25 cm, schwarz	Stück
PB-FR30S	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 30 cm, schwarz	Stück
PB-FR35S	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 35 cm, schwarz	Stück
PB-FR40S	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 40 cm, schwarz	Stück
PB-FR45S	US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 45 cm, schwarz	Stück



Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch „Duo“



Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-DUO130S	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 30 cm, Schwarz	Stück
PB-DUO130	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 30 cm	Stück
PB-DUO135	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 35 cm	Stück
PB-DUO140	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 40 cm	Stück
PB-DUO145	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 45 cm	Stück



Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-DUO230	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 30 cm	Stück
PB-DUO235	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 35 cm	Stück
PB-DUO240	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 40 cm	Stück
PB-DUO245	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 45 cm	Stück



Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) mit Loch



Nylon Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

100% Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-NY20WL	US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 20 cm	Stück
PB-NY25WL	US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 25 cm	Stück
PB-NY30WL	US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-NY35WL	US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-NY40WL	US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-NY45WL	US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 45 cm	Stück

Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-BW20WL	US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 20 cm	Stück
PB-BW25WL	US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 25 cm	Stück
PB-BW30WL	US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-BW35WL	US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-BW40WL	US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-BW45WL	US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 45 cm	Stück

Frottee Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-FR20WL	US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 20 cm	Stück
PB-FR25WL	US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 25 cm	Stück
PB-FR30WL	US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-FR30SL	US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 30 cm, Schwarz	Stück
PB-FR35WL	US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-FR35SL	US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 35 cm, Schwarz	Stück
PB-FR40WL	US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-FR45WL	US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 45 cm	Stück

Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) mit Loch „Duo“



Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-DUO130SL	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 30 cm, Schwarz	Stück
PB-DUO130L	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 30 cm	Stück
PB-DUO135L	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 35 cm	Stück
PB-DUO140L	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 40 cm	Stück
PB-DUO145L	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 45 cm	Stück



Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-DUO230L	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 30 cm	Stück
PB-DUO235L	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 35 cm	Stück
PB-DUO240L	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 40 cm	Stück
PB-DUO245L	US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 45 cm	Stück



Stumpfstrümpfe Oberschenkel (OS) ohne Loch



Nylon Oberschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

100% Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-ONY30W	OS-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-ONY35W	OS-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-ONY40W	OS-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-ONY45W	OS-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 45 cm	Stück

Baumwoll Oberschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-OBW30W	OS-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-OBW35W	OS-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-OBW40W	OS-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-OBW45W	OS-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 45 cm	Stück

Frottee Oberschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-OSFR30W	OS-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-OSFR35W	OS-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-OSFR40W	OS-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-OSFR45W	OS-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 45 cm	Stück



Stumpfstrümpfe Oberschenkel (OS) mit Loch



Nylon Oberschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

100% Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-ONY30WL	OS-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-ONY35WL	OS-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-ONY40WL	OS-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-ONY45WL	OS-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 45 cm	Stück

Baumwoll Oberschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-OBW30WL	OS-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-OBW35WL	OS-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-OBW40WL	OS-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-OBW45WL	OS-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 45 cm	Stück

Frottee Oberschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

85% Baumwolle, 15% Polyamid




Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-OSFR30WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 30 cm	Stück
PB-OSFR35WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 35 cm	Stück
PB-OSFR40WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 40 cm	Stück
PB-OSFR45WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 45 cm	Stück
PB-OFR30WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 30 cm, nahtlos kräftig	Stück
PB-OFR35WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 35 cm, nahtlos kräftig	Stück
PB-OFR40WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 40 cm, nahtlos kräftig	Stück
PB-OFR45WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 45 cm, nahtlos kräftig	Stück

11. Keasy und Kosmetiken

eSkin Leg Cover



- Flexibel und vorgedehnt
- Wasserfest
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Geringe Adhäsion
- Mehrlagiges faserverstärktes Polymer

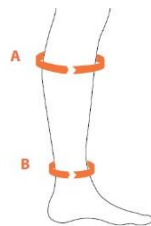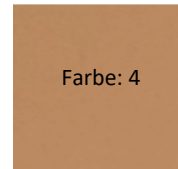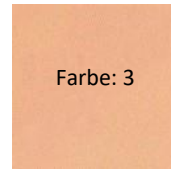

Standard



Split Toe

eSkin Leg Cover „Standard“

Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Wadenumfang (A)	Knöchelumfang (B)	Länge	Farbe
PYE6S2x2xX0X	Links	23-24cm	32-34cm	20-21cm	550mm	3 / 4
	oder	25-26cm	34-36cm	21-22cm	oder	
	Rechts	27-28cm	36-38cm	22-23cm	600mm	

Alle eSkin Leg Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

Artikelnummer (Standard): PYE6S2x2xX0X

Zusammensetzung der Artikelnummer:

2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

eSkin Leg Cover „Split Toe“

Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Wadenumfang (A)	Knöchelumfang (B)	Länge	Farbe
PYE6T2x2xX0X	Links	23-24cm	32-34cm	20-21cm	550mm	3 / 4
	oder	25-26cm	34-36cm	21-22cm	oder	
	Rechts	27-28cm	36-38cm	22-23cm	600mm	

Alle eSkin Leg Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.



Artikelnummer (Split Toe): PYE6T2x2xX0X

Zusammensetzung der Artikelnummer:

2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

eSkin Foot Cover

- Flexibel und vorgedehnt
- Wasserfest
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Geringe Adhäsion
- Mehrlagiges faserverstärktes Polymer

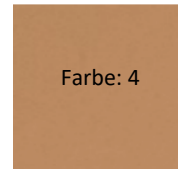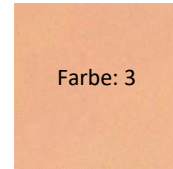

Standard



Split Toe

eSkin Leg Cover „Standard“

Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Farbe
PYE2x2xXSX	Links / Rechts	23-24cm 25-26cm 27-28cm	3 / 4

Alle eSkin Foot Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

Artikelnummer (Standard): PYE2x2xXSX

Zusammensetzung der Artikelnummer:

2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

eSkin Leg Cover „Split Toe“

Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Farbe
PYE2x2xXSX	Links / Rechts	23-24cm 25-26cm 27-28cm	3 / 4

Alle eSkin Foot Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

Artikelnummer (Standard): PYE2x2xXTX

Zusammensetzung der Artikelnummer:

2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)



Kosmetiken

Schaumkosmetik PE Unterschenkel



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1530	Schaumkosmetik PE Unterschenkel, eckig, beige, 30mm	Stück
PYA1531	Schaumkosmetik PE Unterschenkel, rund, weiß, 30mm	Stück


Oberschenkelkosmetik mit durchbrochenem Knie



Größe „S“ 84 cm lang, Umfang: 50 cm Oberschenkel, 35 cm Wade
 Größe „M“ 87 cm lang, Umfang: 52 cm Oberschenkel, 37 cm Wade
 Größe „L“ 94 cm lang, Umfang: 55 cm Oberschenkel, 41 cm Wade

Artikelnummer	Bezeichnung	Seite	Einheit
PP1G0-SL	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „S“	links	Stück
PP1G0-SR	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „S“	rechts	Stück
PP1G0-ML	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „M“	links	Stück
PP1G0-MR	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „M“	rechts	Stück
PP1G0-LL	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „L“	links	Stück
PP1G0-LR	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „L“	rechts	Stück

Oberschenkelkosmetik

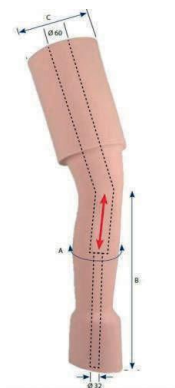

Artikelnummer	Bezeichnung	Seite	Einheit
PP1G13-D36	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 36 cm	Rechts	Stück
PP1G13-D40	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 40 cm	Rechts	Stück
PP1G13-D44	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 44 cm	Rechts	Stück
PP1G13-G36	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 36 cm	Links	Stück
PP1G13-G40	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 40 cm	Links	Stück
PP1G13-G44	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 44 cm	Links	Stück

Unterschenkelkosmetik, vorgeformt



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1G1L	Schaumkosmetik Unterschenkel, vorgeformt, EVA, links	Stück
PP1G1R	Schaumkosmetik Unterschenkel, vorgeformt, EVA, rechts	Stück

Vorfußersatz



*Umfangmaße der Zehengrundgelenke.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MB87201	Vorfußersatz aus Weichschaum, rechts, mittel, Umfang* ca. 22,5 cm	Stück
MB87202	Vorfußersatz aus Weichschaum, rechts, groß, Umfang* ca. 24 cm	Stück
MB87211	Vorfußersatz aus Weichschaum, links, mittel, Umfang* ca. 22,5 cm	Stück
MB87212	Vorfußersatz aus Weichschaum, links, groß, Umfang* ca. 24 cm	Stück

Kosmetikstrümpfe

100% Nylon



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PB-UNY-KS01	Nylon US-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Gr. 1	Paar
PB-UNY-KS02	Nylon US-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Gr. 2	Paar
PB-UNY-KS03	Nylon US-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Gr. 3	Paar
PB-ONY-KS00	Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 45cm, Gr. 0	Paar
PB-ONY-KS01	Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 55cm, Gr. 1	Paar
PB-ONY-KS02	Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 65cm, Gr. 2	Paar
PB-ONY-KS03	Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 75cm, Gr. 3	Paar
PB-ONY-KS04	Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 80cm, Gr. 4	Paar

Kosmetiküberzug




Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!

- Professionelle Imitation der Haut
- 3D-Optik
- Für Frauen und Männer
- In vielen verschiedenen Farben erhältlich (siehe Farbmuster)

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PSPC-F-L-000	Farbmuster für Kosmetiküberzug, Männer	Stück
PSPC-F-L-001	Farbmuster für Kosmetiküberzug, Frauen	Stück

Größentabelle:

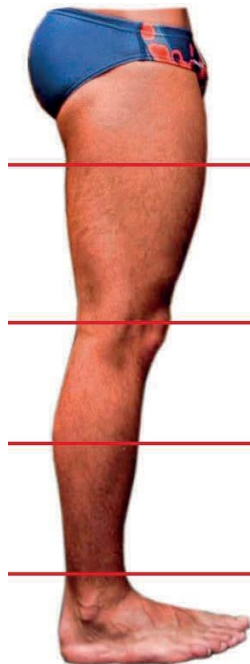

XS	S	M	L	XL	XXL
38-47	45-52	50-58	56-64	62-70	68-76
27-33	32-38	37-43	42-48	47-53	52-58
23-29	28-34	33-37	38-44	43-47	48-55
17-20	19-22	21-25	24-28	27-31	30-34

Artikelnummer:

PSPC-

Mann/Frau

Seite

Größe (s.o.)

Farbe

Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!

Keasy



- Thermoplastisch verformbarer Weichwandinnenkonus (bei 170°) für individuelle Formen und gleichmäßige Wandstärken
- Leicht und schnell gefertigt
- Gut schleifbar
- Kann 4 – 5 Mal wieder verformt werden
- Nahtlose, geschlossenzellige Oberfläche
- Bequem, hautfreundlich und langlebig
- Kleinste Größe auch für Kinder und obere Extremitäten geeignet

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1S402-110	Keasy Weichwand Konus US, Länge: 30 cm, Ø Prox.: 11 cm, 5 mm dick	Stück
PP1S400-130	Keasy Weichwand Konus US, Länge: 50 cm, Ø Prox.: 13 cm, 6,5 mm dick	Stück
PP1S400-160	Keasy Weichwand Konus US, Länge: 40 cm, Ø Prox.: 16 cm, 6,5 mm dick	Stück
PP1S400-180	Keasy Weichwand Konus US, Länge: 50 cm, Ø Prox.: 18 cm, 6,5 mm dick	Stück
PP1S400-210	Keasy Weichwand Konus OS, Länge: 50 cm, Ø Prox.: 21 cm, 6,5 mm dick	Stück
PP1S401-170	Keasy Weichwand Konus US, Länge: 42 cm, Ø Prox.: 17 cm, 3 mm dick	Stück

FlexNeo Cover

FlexNeo AK und AK MAX



Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!

- Wasserfest
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Einfaches Anlegen dank Magnetverschlussystem
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Gewicht: ca. 500 - 600 g (AK und AK MAX)
- Optionale Zusätze:
 - Matte Oberfläche
 - Individuelles Tattoo
 - FlexNeo Cover DUO Oberschenkelhülse



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PA-Flex1NSe	FlexNeo Cover AK, Oberschenkel, nach Maß, ohne Scan	Stück
PA-Flex1NSeP	FlexNeo Cover AK, Oberschenkel, nach Maß, ohne Scan, Tattoo	Stück
PA-Flex2NM	FlexNeo Cover AK MAX, Oberschenkel, nach Maß, mit Scan	Stück
PA-Flex4NMP	FlexNeo Cover AK MAX, Oberschenkel, nach Maß, mit Scan, Tattoo	Stück
PA-FlexM	Matte Oberfläche, optional	Stück



Normale Oberfläche



Matte Oberfläche

Alle verfügbaren Farben, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www.protheseus.de/downloads.php oder auf Anfrage per Mail.

Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!

FlexNeo BK und BK MAX



Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!

- Wasserfest
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Einfaches Anlegen dank Magnetverschlussystem (nur BK MAX)
- Bitte beachten: das BK Cover ohne Scan wird in die Fußkosmetik gesteckt und hat keinen Magnetverschluss auf der Rückseite
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Gewicht: ca. 300 - 450 g (BK und BK MAX)
- Optionale Zusätze:
 - Matte Oberfläche
 - Individuelles Tattoo



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PA-Flex1NSU	FlexNeo Cover BK, Unterschenkel, nach Maß, ohne Scan	Stück
PA-Flex1NSUP	FlexNeo Cover BK, Unterschenkel, nach Maß, ohne Scan, Tattoo	Stück
PA-Flex2NMU	FlexNeo Cover BK MAX, Unterschenkel, nach Maß, mit Scan	Stück
PA-Flex4NMUP	FlexNeo Cover BK MAX, Unterschenkel, nach Maß, mit Scan, Tattoo	Stück
PA-FlexM	Matte Oberfläche, optional	Stück



Normale Oberfläche



Matte Oberfläche

Alle verfügbaren Farben, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www.protheseus.de/downloads.php oder auf Anfrage per Mail.

Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!

FlexNeo Phantom



Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!

- Besteht aus FlexNeo AK MAX und FlexNeo Duo
- Die „Duo“ Oberschenkelhülse wird mit einem speziellem „Nextt-Knopf“ am Schaft befestigt
- Wasserfest
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Kompatibel mit Knie-Rotations-Adapttern
- Eine Scandatei wird zur Bestellung benötigt!
- Optionale Zusätze:
 - Matte Oberfläche



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PA-FlexPH	FlexNeo Cover Phantom, AK Cover inkl. Duo, nach Maß, mit Scan	Stück
PA-FlexPHP	FlexNeo Cover Phantom, AK Cover inkl. Duo, nach Maß, mit Scan, Tattoo	Stück
PA-FlexM	Matte Oberfläche, optional	Stück



Normale Oberfläche



Matte Oberfläche

Alle verfügbaren Farben, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www.protheseus.de/downloads.php oder auf Anfrage per Mail.

Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!

FlexNeo Duo



Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!

- Wasserfest
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Erweiterung für das FlexNeo Cover AK MAX
- Befestigung am Schaft dank speziellem „Nextt-Knopf“
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Optionale Zusätze:
 - Matte Oberfläche



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PA-FlexDUO	FlexNeo Cover Duo, Oberschenkelhülse, nach Maß, mit Scan	Stück
PA-FlexM	Matte Oberfläche, optional	Stück



Normale Oberfläche



Matte Oberfläche

Alle verfügbaren Farben, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www.protheseus.de/downloads.php oder auf Anfrage per Mail.

Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!

AS Cover



Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!

- Wasserfest
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Einfaches An- und Ausziehen dank Pinverschlussystem
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Aufteilung in vier verschiedene Designkategorien
 - **Lässiges Design:** Arc, True, Forma, Mesh
 - **Elegantes Design:** Halo, Link, Dew, Eden
 - **Sportliches Design:** Apex, Blaze, ID, Prime

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PASC [...]	AS Cover [...]	Stück

Alle verfügbaren Farben und Designs, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www.protheseus.de/downloads.php oder auf Anfrage per Mail.

Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!

12. Amparo

Confidence Socket



- **Geeignet für TT / Unterschenkelamputationen**
- Verwendbar als Interim- und Probeschäft
- Inkl. 4-Loch Montage Platte mit 1 cm Versatz

Zusätzlich erhältlich:

- Wahlweise mit passivem Vakuum- oder Pin Lock System
- **Achtung:** Das Vakuum- und Pin Lock System sind nicht im Erwerb des Confidence Schaftes enthalten und müssen separat dazubestellt werden!

Pin Lock System

- Schnelles An- und Ausziehen
- Hervorragende Kniebeweglichkeit
- Sichere Verbindung



Passives Vakuum System

- Reduziert Druck in Belastungsflächen
- Hervorragende Unterstützung für das Knie
- Erhöhter Komfort



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PDCSBKPS	Confidence Socket, Pin Version, Gr. S, bis 125 kg, dist. Umf. 23 – 34 cm, Farbe: Schwarz	Stück
PDCSBKPL	Confidence Socket, Pin Version, Gr. L, bis 150 kg, dist. Umf. 30 – 45 cm, Farbe: Schwarz	Stück
PDCSBKVS	Confidence Socket, Vakuum Version, Gr. S, bis 125 kg, dist. Umf. 23 – 34 cm, Farbe: Schwarz	Stück
PDCSBKVL	Confidence Socket, Vakuum Version, Gr. L, bis 150 kg, Dist. Umf. 30 – 45 cm, Farbe: Schwarz	Stück

Pin Lock System

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PDCSPL	Pin Lock System für Confidence Schaft, 52x98x22 mm, Gewicht: 180 g	Stück

Passives Vakuum System

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PDCSVAL	Einweg Ventil für Confidence Schaft, 18x19x19 mm, Gewicht: 20 g	Stück

Resilience Socket



- **Geeignet für TT / Unterschenkelamputationen**
- Verwendbar als Interim- und Probeschäft
- Inkl. 4-Loch Montage Platte ohne Versatz

Zusätzlich erhältlich:

- Passives Vakuum-, aktives Vakuum- oder Pin Lock System
- **Achtung:** Die Vakuum- und Pin Lock Systeme sind nicht im Erwerb des Resilience Schaftes enthalten und müssen separat dazubestellt werden!

Pin Lock System

- Schnelles An- und Ausziehen
- Hervorragende Kniebeweglichkeit
- Sichere Verbindung



Aktives Vakuum System

- Minimierte Bewegung im Schaft
- Erhöhte Körperwahrnehmung
- Erhöhter Balance



Passives Vakuum System

- Reduziert Druck in Belastungsflächen
- Hervorragende Unterstützung für das Knie
- Erhöhter Komfort



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PDRSM-BC	Resilience Socket, bis 125 kg, dis. Umf. 20–38 cm, Farbe: Blau/Carbon	Stück
PDRSM-CA	Resilience Socket, bis 125 kg, dis. Umf. 20–38 cm, Farbe: Camouflage	Stück
PDRSM-DB	Resilience Socket, bis 125 kg, dis. Umf. 20–38 cm, Farbe: Dunkelblau	Stück
PDRSM-LB	Resilience Socket, bis 125 kg, dis. Umf. 20–38 cm, Farbe: Hellblau	Stück

Pin Lock System

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PDPLUR	Pin Lock System für Resilience Schaft, Pin Länge: 57 mm	Stück

Aktives Vakuum System

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PDEVK	Hochvakuum System für Resilience Schaft, M5 Verbindung	Stück

Passives Vakuum System

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PDRVK	Einweg Ventil für Resilience Schaft, M5 Verbindung	Stück

Mobile Werkstatt



In der mobilen Werkstatt sind folgende Produkte jeweils 1x enthalten:

- Werkstatt- und Werkzeugkoffer
- Mobile Vakuumpumpe
- Pads/Pelotten
- Thermohandschuhe
- Markierstift
- Mobiler Ofen
- Vakuum Adapter
- Leder- und Textilschere
- Stretchfolienhalter inkl. Stretchfolie
- Tiefziehstrümpfe

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PDW100	Amparo Mobile Werkstatt	Stück

In der mobile Werstatt enthaltene Produkte:

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PDWWB	Werkstattkoffer (ohne Inhalt)	Stück
PDWTSB	Werkzeugkoffer (ohne Inhalt)	Stück
PDWMO	Mobiler Ofen	Stück
PDWVP	Mobile Vakuumpumpe	Stück
PDWVA	Vakuum Adapter	Stück
PDWSP	Pads/Pelotten für Confidence und Resilience Schäfte	Set
PDWLSH	Leder Schere	Stück
PDWTSC	Textil Schere	Stück
PDWTGL	Thermohandschuhe	Paar
PDWSF	Stretch Folien Rolle	Stück
PDWMT	Tiefziehstrümpfe, Schlauch, weiß, 23m	Stück

13. Elevate 360°

Elevate 360° Fußheberorthese mit BOA Verschluss



HMV-Nr.: 23.03.02.0019



Elevate® Funktion

Die Elevate®-Orthese zeichnet sich durch einfache Handhabung und vorhersehbare Funktion aus. Die Bandage lässt sich schnell um den Knöchel legen und mit einem Klettverschluss befestigen. Eine Schnalle sorgt für zusätzliche Verstärkung und Passform. Die starke, strapazierfähige Kordel lässt sich leicht auf das mitgelieferte Anchor Hook Kit aufziehen, und der Hebewinkel lässt sich mit einem einfach zu bedienenden Drehknopf des BOA® Fit Systems nach Wunsch einstellen und schnell lösen.

Elevate® Komfort

Die Elevate®-Orthese wurde entwickelt, um unbequeme, steife oder sperrige Orthesen, die im Schuh getragen werden, zu ersetzen. Durch sorgfältige Materialauswahl entstand eine erstaunlich leichte (nur 227 g), aber dennoch robuste und langlebige Orthese.

Elevate® Vielseitigkeit

Die Elevate®-Orthese kann an die Bedürfnisse und Vorlieben des Anwenders angepasst werden. Das Design ermöglicht eine Vielzahl von Schuhmodellen, einschließlich Sandalen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
OFS10060	Elevate 360° Fußheberorthese mit BOA-Drehverschluss	Stück

14. Comfit AFO



HMV-Nr.: 23.03.02.6031

Vorteile

- Passt, dank des flachen Designs, in nahezu jeden Schuh
- Superleicht – nur 95 g in Gr. „L“, ohne Polster

Indikationen

- Fußheberparese
- Fallfuß
- Reversibler Spitzfuß, z.B. nach Schlaganfall, multipler Sklerose o.a. neurologischen Erkrankungen

Kontraindikationen

- Makroskopische Verformung des Fußes oder Sprunggelenkes
- Akute ödemische Spastik mit mäßiger bis schwere Ausprägung
- Kontraktur des vorderen und des hinteren Schienbeinmuskels, welche sich durch die einfache Haltungskorrektur der Orthese nicht beheben lässt

Im Lieferumfang sind jeweils die passenden Wadenpolster inkl. Klettverschluss 1x enthalten.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
O10E806113	Comfit AFO Peronäusschiene, Small, Links, Standard, bis Gr. 42	Stück
O10E806123	Comfit AFO Peronäusschiene, Small, Rechts, Standard, bis Gr. 42	Stück
O10E806117	Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Links, Standard, bis Gr. 43	Stück
O10E806127	Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Rechts, Standard, bis Gr. 43	Stück
O10E806157	Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Links, Breit, bis Gr. 43	Stück
O10E806167	Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Rechts, Breit, bis Gr. 43	Stück
O11E8061T03	Comifit AFO Polsterset, Small, bis Gr. 42	Stück
O11E8061T05	Comfit AFO Polsterset, Large, bis Gr. 47	Stück

15. Hylton Kompressionsorthesen

Schulter / Rumpf / Shirt, kurzarm



Artikelnummer: HOSSxx

Die Oberkörperorthese mit kurzen Ärmeln bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und von sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebrale Lähmungen, Down Syndrom, Rett Syndrom, Autismus, Bewegungsstörungen und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Mit Reißverschluss und Silikonabschlussband
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

Schulter / Rumpf / Shirt, langarm



Artikelnummer: HOSxx

Die Oberkörperorthese mit langen Ärmeln bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und von sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebrale Lähmungen, Down Syndrom, Rett Syndrom, Autismus, Bewegungsstörungen und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Mit Reißverschluss und Silikonabschlussband
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

Artikelnummer, Kurzarm	Artikelnummer, Langarm	Brustumfang in cm	Länge in cm Acromion zu T. Major	Einheit
HOSS41	HOS41	41	23,00	Stück
HOSS44	HOS44	44	27,94	Stück
HOSS47	HOS47	47	31,11	Stück
HOSS51	HOS51	51	35,56	Stück
HOSS54	HOS54	54	39,00	Stück
HOSS57	HOS57	57	45,72	Stück
HOSS60	HOS60	60	47,00	Stück
HOSS64	HOS64	64	50,50	Stück
HOSS67	HOS67	67	56,40	Stück
HOSS70	HOS70	70	60,50	Stück
HOSS73	HOS73	73	64,30	Stück
HOSS77	HOS77	77	68,50	Stück

Becken / Bein / Hose, kurz



Artikelnummer: HOSPxx

Die knielange Beinorthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit einer Oberkörperorthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrom, Ataxi, Autismus und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- **Maß: Umfang Taille über Nabel ist erforderlich**

Becken / Bein / Hose, lang



Artikelnummer: HOPxx

Die knöchellange Beinorthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit einer Oberkörperorthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrom, Ataxi, Autismus und Sinnesverarbeitungsproblemen.

Maß: Umfang Taille über Nabel ist erforderlich

Artikelnummer, Hose kurz	Artikelnummer, Hose lang	Umfang Taille über Nabel in cm	Länge in cm, Hose kurz	Länge in cm, Hose lang	Einheit
HOSP43	HOP43	43	27,30	40,33	Stück
HOSP45	HOP45	45	30,48	45,00	Stück
HOSP47	HOP47	47	32,00	47,95	Stück
HOSP49	HOP49	49	33,02	49,80	Stück
HOSP51	HOP51	51	34,29	52,70	Stück
HOSP53	HOP53	53	36,83	56,84	Stück
HOSP55	HOP55	55	39,37	63,19	Stück
HOSP57	HOP57	57	42,54	66,60	Stück
HOSP59	HOP59	59	45,30	70,04	Stück
HOSP61	HOP61	61	46,00	71,70	Stück
HOSP63	HOP63	63	48,89	77,80	Stück
HOSP65	HOP65	65	50,16	79,30	Stück
HOSP67	HOP67	67	54,70	81,70	Stück
HOSP69	HOP69	69	55,25	82,30	Stück
HOSP71	HOP71	71	57,50	86,20	Stück
HOSP73	HOP73	73	59,50	90,50	Stück

TLSO Weste



Artikelnummer: HOVxx

Die TLSO Weste unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörungen, Muskelschwund und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

TLSO Weste, X-Panels



Artikelnummer: HOVxx

Die TLSO Weste mit zwei X-Panels unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörungen, Muskelschwund und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss
- Mit starren posterior X-Panels
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

Artikelnummer, TLSO Weste	Artikelnummer, TLSO Weste mit X-Panels	Brustumfang in cm	Länge in cm Acromion zu T. Major	Einheit
HOV41	-	41	27,00	Stück
HOV44	HOVX44	44	30,75	Stück
HOV47	HOVX47	47	34,50	Stück
HOV51	HOVX51	51	38,25	Stück
HOV54	HOVX54	54	44,00	Stück
HOV57	HOVX57	57	47,75	Stück
HOV60	HOVX60	60	51,50	Stück
HOV64	HOVX64	64	55,25	Stück
HOV67	HOVX67	67	59,00	Stück
HOV70	-	70	62,75	Stück
HOV73	-	73	66,50	Stück
HOV77	-	77	70,25	Stück

Arm, lang



Artikelnummer: HOASxx

Die Armorthese bewirkt die volle Armstabilität und Kontrolle der Feinmotorik; steigert das Gefühl für die Gliedmaßen Koordination und gibt neurologische Rückmeldungen. Sie ist ideal für Patienten mit Hemiplegie, Verletzungen des Plexus Brachialis, cerebraler Lähmung und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Mit Silikonabschlussband
- **Maß: Umfang Oberarm an Achsel ist erforderlich**

Artikelnummer	Oberarmumfang in cm	Länge in cm	Einheit
HOAS13	13	19,05	Stück
HOAS14	14	20,06	Stück
HOAS16	16	22,86	Stück
HOAS17	17	24,07	Stück
HOAS18	18	28,00	Stück
HOAS20	20	30,48	Stück
HOAS21	21	32,04	Stück
HOAS22	22	35,56	Stück
HOAS24	24	38,10	Stück
HOAS25	25	40,00	Stück
HOAS26	26	42,50	Stück
HOAS28	28	45,72	Stück

Unterarm / Hand, kurz



Artikelnummer: HOGx

Die Unterarm- Handgelenksorthese bewirkt die Kontrolle der Feinmotorik, steigert die Stabilität, verringert Hypersensibilität und erhöht die sensorische Wahrnehmung in der Hand und dem Handgelenk. Sie ist ideal für Patienten mit einseitiger Lähmung, athetotische- oder spastische Tetraplegie, Rett Syndrom, Angelman Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- **Maß: Breite der Hand über Daumen ist erforderlich**

Artikelnummer	Handbreite über Daumen in cm	Länge in cm	Einheit
HOG5	5	11,43	Stück
HOG5.5	5,5	12,19	Stück
HOG6	6	13,03	Stück
HOG6.5	6,5	14,04	Stück
HOG7	7	15,55	Stück
HOG7.5	7,5	16,50	Stück
HOG8	8	17,02	Stück

16. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse

QuickFit™ Buckle



- Magnetische Schnalle
- Ermöglicht dem Anwender ein einfaches Befestigen des QuickFit™ Straps
- Ideal für Anwender mit eingeschränkter Fingerfertigkeit oder für die Platzierung an schwer erreichbaren Stellen
- Dank der robusten Kunststoffschnittstelle muss der Klettverschluss nicht wiederholt Ein- und Ausgehängt werden
- Einfache Einhand-Bedienung



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK141500005	QuickFit™ Buckle 1,5"-38mm schwarz Magnetverschluß	Stück

QuickFit™ Strap



- Mikroverstellbarkeit
- Jedes „Klicken“ des BOA-Drehknopfes verschiebt den Strap um 1 mm und sorgt so jedes Mal für die perfekte Passform
- Schnell, einfach und individuell anpassbar
- Konfektioniert, strapazierfähig und in wenigen Minuten angebracht
- Benutzerfreundlich und bequem



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK141013005	QuickFit™ Strap 1,5"-38mm schwarz	Stück

QuickFit™ Lacer



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK018013005	QuickFit™ Lacer, Ø30 mm Knopf, Gr. XS, 4 Schlaufen	Stück
PK020013005	QuickFit™ Lacer, Ø30 mm Knopf, Gr. S, 6 Schlaufen	Stück
PK022013005	QuickFit™ Lacer, Ø30 mm Knopf, Gr. M, 8 Schlaufen	Stück
PK024023005	QuickFit™ Lacer, Ø37 mm Knopf, Gr. L, 10 Schlaufen	Stück

QuickFit™ Releasing Lacer



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK0165230	QuickFit™ Releasing Lacer, Ø37 mm Knopf	Stück

Ersatzteile



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK02LACERSM	Ersatz für QuickFit™ Lacer, XS, S und M	Stück
PK02LACERL	Ersatz für QuickFit™ Lacer L	Stück

Zubehör QuickFit™ Lacer



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK020SP104Z	Nietzange für QuickFit™ Lacer	Stück
PK020SP1040	Nieten für QuickFit™ Lacer, Farbe: Schwarz, 100 Stück	Stück

Magnetverschlüsse



(Bild 1)



(Bild 2)



(Bild 3)



(Bild 4)

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PKM6021	Magnet-Verschluss, mech. Verriegelung, seitlich schiebbar, 20 mm	Stück
PKM8010	Magnet-Verschluss, mech. Verriegelung, seitlich schiebbar, 30 mm	Stück
PKM1130	Magnet-Verschluss, V-Buckle, 25 mm	Stück
PKM6022	Magnet-Knopfverschluss, schraubbar	Stück



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0
Fax: 09122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich
