



PROTHESEUS



AS-Cover

Farben, Designs & Mehr

VERSION: 12.02.24

Protheseus GmbH

Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 | Fax: 09122 8870729

E-Mail: info@protheseus.de | www.protheseus.de

Die AS-Cover sind auf vier verschiedene Kollektionen aufgeteilt, welche auf alle Anlässe im Alltag abgestimmt sind; für den normalen Alltag, für besondere Anlässe und alles was dazwischen liegt. Cover für schlichte Eleganz und Cover für das gewisse Extra. Auf den folgenden Seiten finden Sie 16 verschiedene Designs, aufgeteilt in vier verschiedene Kollektionen, damit Sie Ihren persönlichen Favoriten finden können!

FAQ

Wie wird das Cover an der Prothese befestigt?

Das Cover wird mit einem Adapter an der Prothese befestigt. Der mitgesendete Adapter kann problemlos an den vorhandenen Rohradapter montiert werden. Das Cover „klickt“ auf den Adapter und wird zusätzlich mit einem Gummiband und/oder einem Schnappverschluss für die ideale Position befestigt. Falls kein Rohradapter vorhanden sein sollte, wird eine individuelle Halterung für die vorhandenen Passteile gefertigt. Diese Lösung erlaubt auch eine weiterhin normale Anpassung an der Prothese.

Wie ist die Lebensdauer der Cover?

Die Haltbarkeit der Cover variiert mit dem entsprechendem Gebrauch und der Art des gewähltem Designs. Empfindliche und größtenteils offene Designs sind sensibler gegenüber vertikalen Kräften und äußeren Einwirkungen. Falls Leistungssport mit hohen Einwirkungen oder ähnliche Aktivitäten geplant sein sollten, ist es, im Sinne der Lebenslänge des Covers empfehlenswert, das Cover für die Zeit abzulegen.

Wie lange ist die Lieferzeit für ein Cover?

Normalerweise dauert die Lieferung für ein Cover zwischen 8-10 Wochen. Die Lieferzeit hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, beispielweise die Qualität der Scans, Fotos etc. Falls eine Folierung benötigt wird, dauert die Lieferzeit eine Woche länger, 9-10 Wochen. Da jedes Cover ein Unikat ist, sind die angegebenen Lieferzeiten erfahrungsmäßige Richtwerte und kann je nach Komplexität variieren.

Wie wird ein Cover produziert?

Jedes Cover geht einen langen Weg durch eine individuelle, digitale Designphase hin zum 3D-Druck. Im Anschluss folgt eine persönliche Nachbearbeitung, inkl. bemalen, lackieren oder folieren.

Wie werden die Form und Größe von meinem Cover bestimmt?

Die Höhe basiert auf dem Prothesenaufbau und den Daten, welche Sie in dem Bestellformular angeben. Falls die gewünschte Höhe nicht angegeben ist, wird diese für die bestmögliche Silhouette und dem Übergang zum Schaft bestimmt. Falls Sie weitere, individuelle Wünsche zur Form haben, können Sie diese bei „Zusätzliche Informationen“ auf dem Bestellformular angeben. **Bitte immer eine Scandatei beifügen!**

Kategorie: Lässiges Design

Vielseitig, stilvoll und zeitlos – in der Kategorie „Lässiges Design“ steht der Alltag im Vordergrund. Nutzen Sie die breite Palette an Farboptionen, um den Ausdruck zu schaffen, der perfekt zu Ihrem Alltagsstil passt.



**Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):**



Design: Arc | Farbe: Metallic Silver



Design: True | Farbe: Berry Purple



Design: Forma | Farbe: Black Matte



Design: Mesh | Farbe: Metallic Blue

P64 V2-12.02.24 2/5

Kategorie: Elegantes Design

Mit metallischen Elementen, Leder-Details, dekorativen Blumen und 3D-Verzierungen geht es in der Kategorie „Elegantes Design“ um die Aufwertung von Accessoires und Eleganz. Die folgenden Designs passen perfekt zu besonderen Anlässen und wenn Sie sich ein wenig extra Elegant fühlen möchten!



**Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):**



Design: Halo | Farbe: Metallic Silver/Brown Leather



Design: Link | Farbe: Black/Gold



Design: Dew | Farbe: Rose Gold




Design: Eden | Farbe: Pure Red

Kategorie: Sportliches Design

Fitnessstudio, Yoga oder Leben außer Haus – in der Kategorie „Sportliches Design“ geht es um genau das was der Name zu vermuten lässt – Sport! Mit Elementen aus Textilbändern, Gummibändern und Details in verschiedenen Farben, können Sie die sportlichen Designs mühelos mit Ihrer Trainingskleidung oder Ihren Lieblings-Sneakern kombinieren.



**Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):**

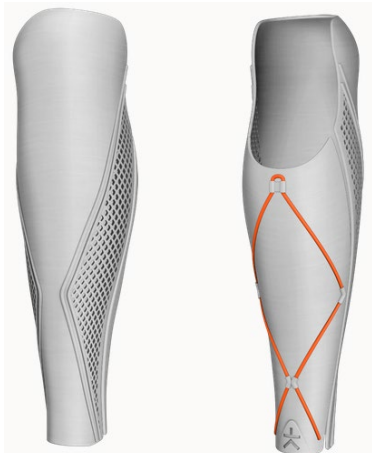

Design: Apex | Farbe: Metallic Silver/Orange



Design: Blaze | Farbe: Sunny Yellow/Black Matte



Design: ID | Farbe: Blue/Orange/White



Design: Prime | Farbe: Metallic Silver/Black Matte

Kategorie: Statement Design

Kühne Formen, ausgefeilte Details und 3D-Dekorationen - die Kategorie „Statement Design“ besteht aus Designs mit einer Menge Attitüde, geschaffen für diejenigen, die ein wenig mehr herausstechen wollen.



**Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):**



Design: Icon | Farbe: Metallic Silver



Design: Prism | Farbe: Black Basic



Design: Phantom | Farbe: Black Matte



Design: Armour | Farbe: Metallic Blue



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0
Fax: 09122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich